



Bacteria Self-checker 『mil-kin(見る菌)®』C-Type

倍率	1,000倍
被写体サイズ	1μm以上
光源	LED
電源	単三型アルカリ乾電池(2本)
寸法 (W×D×H)	mil-kin本体: 55mm×113mm×140mm スマホスタンド含む: 175mm×113mm×146mm
重さ	約450g(本体・スマホスタンド・乾電池)
標準付属品	ピペット(2本) / マイクロチューブ(2個) / 歯間ブラシ(2本) カバーガラス15mm丸型100枚入り(1箱) / 単三型アルカリ乾電池(2本)

●本製品の販売は日本国内のみとさせていただきます。

- 備考
- ※1 防水仕様ではありません。
 - ※2 見るサンプルは液体で透明に近く、光が透過できる液体となります。
 - ※3 スマートフォンは、含まれておりません。
 - ※4 本仕様は2021年10月現在の仕様となり、予告なしに変更する場合がございますので、予めご了承ください。
 - ※5 『mil-kin(見る菌)®』および『菌未来』は、株式会社mil-kinの登録商標です。



*画像はイメージです

mil-kinで見える細菌類

1. 運動性細菌
2. 白血球
3. スピロヘータ
4. 紡錘状菌



発売元

株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問合せ: **0800-170-5541**

対応時間: 月~金 9:00-19:00 土 9:00-17:00 (日曜・祝祭日を除く)

歯科医院様専用フリーダイヤルのため、お問合せは固定電話専用となっております。携帯電話からは03-6880-2155にお問合せください。

製造元

株式会社 **mil-kin**

<https://www.mil-kin.com/>



お問い合わせは




(01)02747937019290

C.02360/2022年12月/PR/3/@40/ 再

YOSHIDA

プラークや磨き残しを

スマホで 簡単チェック

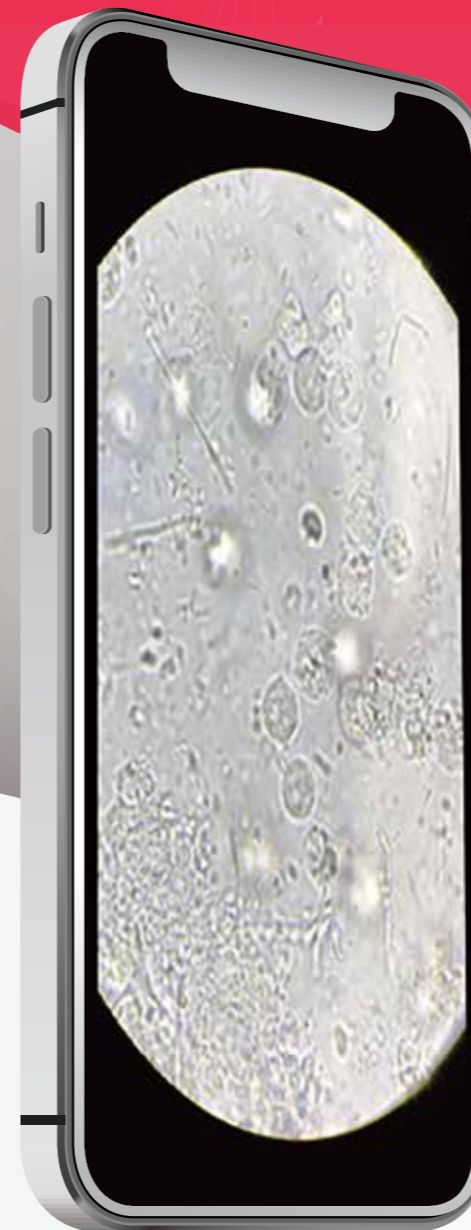

小さいけれど
大きな驚き!

Bacteria Self-checker
『mil-kin(見る菌)®』C-Type

“患者様のモチベーションをあげたいが、TBI をしても、なかなか説明だけでは伝わらない…”

“突然のキャンセルや治療途中で患者様がこなくなってしまう…”

その他にも、
歯科衛生士に自発的に動いてもらいたい…
物販や自費をUPしたい…等々…

mil-kin は患者様のモチベーションアップツールです。

患者様のモチベーションが変わると患者様の行動が変わります。

チェアサイドでの実際流れを見てみよう！

使い方を動画で
チェック！



その悩み mil-kin が解決します



チェアサイドで
簡単チェック



口腔内細菌を
リアルタイムに確認



患者様のモチベーション
デンタルIQをUP



スマートフォンで
簡単チェック



コンパクト設計
訪問診療に対応

かんたん3ステップ

1 採る




見たい場所から
サンプリング

2 載せる



サンプルを
ガラスに載せる

3 見る

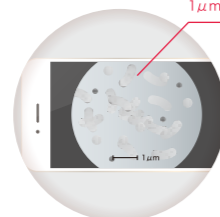

見えるサイズ
1μm以上
スマホで見やすい大きさに
拡大してサンプルを見る

特別なアプリは必要ありません。お持ちのスマートフォンでご使用いただけます。

ツールとして 利用範囲は無敵大！



患者説明ツールとして

“患者さんにその場で見せる”
患者さんの口腔内を「見える化」することで、
患者さんのモチベーションアップへ。



教育ツールとして

“動画や静止画を情報共有”
動画や静止画でビジュアル化でき患者教育だけ
でなく、医院スタッフ間の情報共有や教育にも。

患者様のモチベーション向上により 歯科衛生士のモチベーション向上にも繋がります。

歯周病やプロケアの必要性に対する関心が高まり、ブラッシングや定期来院の意欲向上に繋がります。
患者様と歯科衛生士のコミュニケーションが増え、自然と歯科衛生士のモチベーションも上がり、
目標とやりがいを持って仕事に取り組めます。

