


YOSHIDA

菌はその場で見る時代「菌未来[®]」を創造する

訪問歯科診療の必須アイテム。
カンジダ菌を訪問先で迅速チェック。

モバイル顕微鏡で **YOSHIDA** の見える化

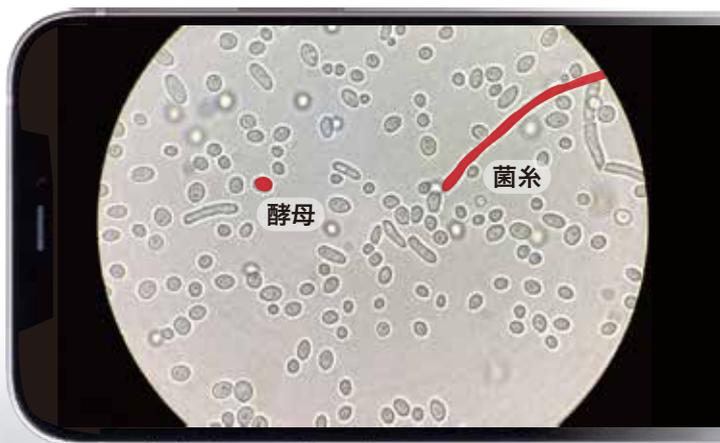

Candida albicans

※赤色はイメージです



Bacteria Self-checker

mil-kin[®]

C-Type

見る菌



動画で使用方法をチェック



「見る菌」の使い方 かんたん3ステップ

STEP 1



採る

舌や粘膜から
サンプリング

STEP 2



載せる

予めカバーガラスを載せた
試料ステージにサンプルを載せる

STEP 3



見る

みやすい大きさにスマホで
拡大してサンプルを見る

※スマートフォンの標準的なカメラ機能でご使用いただけます。

見えるサイズ/酵母形、仮性菌形など1μm以上

携帯できる顕微鏡



コンパクト設計
訪問診療に対応



カンジダ菌の
リアルタイム観察



スマートフォンで
簡単チェック



ベットサイドで
簡単チェック



患者様のモチベーション
デンタルIQをUP

患者さんに その場で見せる



患者説明用ツールとして
患者さんの口腔内を「見える
化」することで、患者さんのモ
チベーションアップへ。

ご家族や 施設スタッフと 情報共有



教育ツールとして
動画や静止画でビジュアル化
でき患者教育だけではなく、
医院スタッフ間の情報共有や
教育にも

● バクテリア・セルフチェッカー 「見る菌」C-Type

- 規格名 携帯形微生物観察器 (JIS B 7271)
- 倍率 光学倍率:1,000倍 (×スマートフォンの倍率)
- 被写体サイズ 1μm以上
- 光源 LED
- 電源 単三型アルカリ乾電池(2本)
- 寸法 mil-kin本体:55mm×113mm×140mm
(W×D×H) スマホスタンド含む:175mm×113mm×146mm
- 重さ 約450g(本体・スマホスタンド・乾電池)
- 標準付属品 ピペット(2本)、マイクロチューブ(2個)、歯間ブラシ(2本)
カバーガラス15mm丸型 100枚入(1箱)、単三型アルカリ乾電池(2本)
- 標準価格 135,000円(税別)

○本製品の販売は日本国内のみとさせていただきます。

- 備考 ※1 防水仕様ではありません。
- ※2 見るサンプルは液体で透明に近く、光が透過できる液体となります。
- ※3 スマートフォンは、含まれておりません。
- ※4 本仕様は2017年6月1日の仕様となり、予告なしに変更する場合がございますので、予めご了承ください。
- ※5 「mil-kin(見る菌)」および「菌未来」は、株式会社mil-kinの登録商標です。
- ※6 推奨機種 iPhone 5以降(カメラレンズのサイズや位置の関係からiPhoneを推奨しています。)

ポケットに
入る大きさ!



お問い合わせはこちら

<https://forms.office.com/r/ud2kESxurX>



カタログ取り寄せ



院内デモ希望



見積り



購入希望

右のQRコードから
お問合せフォームに
アクセスできます



※実際の画面

ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関連する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター **0800-170-5541**

※対応時間 / 月～金 9:00～19:00 ±9:00～17:00
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937022238

C02654/2024年10月 /@20/新