

Ultrasonic3800Z

超音波洗浄器／ウルトラソニック3800Z

- スイープ方式によるムラの少ない洗浄
- シンプルで簡単な操作性
- コンパクトなボディに容量3.8Lの洗浄槽




コンパクトな本体に大きな容量の洗浄槽。
スイープ発振方式でムラの少ない洗浄を可能にしました。



スイープ発振方式

周波数を変調させて発振することにより、定在波の発生を抑制し、洗浄ムラを少なくします。

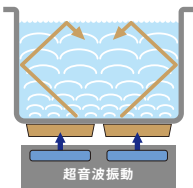

コンパクトなボディに3.8Lの大容量

コンパクトなボディながら3.8Lの洗浄槽で大量の器具が洗浄可能。洗浄の手間を大幅に削減し、洗浄コストを抑えます。

シンプルで簡単な操作性

洗浄する器具を入れてボタンをワンタッチ。シンプルで使いやすい操作パネル。




洗浄能力比較試験

超音波洗浄器にアルミ箔を入れ、その剥離状態により洗浄力を確認します。
(洗浄時間30秒、洗浄液は水道水を使用。)

槽内に水平にアルミ箔を入れる

全体にムラなく剥離が見られます。

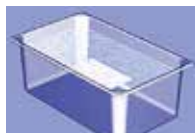

槽内に垂直にアルミ箔を入れる

全体にムラなく剥離が見られます。



(株式会社エスエヌディによる試験結果)

洗浄槽内全体にムラなく超音波による洗浄効果が得られます。

関連商品



ID-213 (インスツルメント洗浄液)

ドイツ応用衛生協会「VAH」規定、欧州規格に準拠。50倍希釈で使用出来るため経済的です。

●標準価格:15,900円(2.5L入)



ID-220 (パー・リーマーファイル)

腐食防止成分を配合しており、器具の材質にやさしい洗浄除菌液です。原液でご使用ください。

●標準価格:10,900円(2.5L入)

ウルトラソニック3800Z仕様

- 標準価格:148,700円 ●本体寸法:W342mm×D201mm×H177mm ●洗浄槽寸法(開口):W299mm×D150mm×H100mm(逆台形状)
- 洗浄槽容量:3.8L ●本体重量:約2.7kg
- 電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:75W ●高周波出力:70W ●発振周波数:44kHz
- ◎販売名:ウルトラソニック3800Z ◎一般的名称:器具除染用洗浄器 ◎届出番号:20B2X00004000009(一般) ◎製造販売元:株式会社エスエヌディ 長野県諏訪市四賀3225-2

※仕様および外観は、製品改良等のため予告なく変更する場合があります。また、商品の色彩は印刷の都合上、実物と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
価格は2025年11月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

ユニット・歯科材料・滅菌器などお問い合わせは

株式会社 **3S** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 ± 9:00～17:00
(日曜・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)



(01)02747937015063

C01947/2025年11月/@20/改