

YOSHIDA

# クラウン除去には時間がかかる！ バーの傷みが早い！

## こんなお悩みを感じている先生へのお役立ちのインスツルメント


こんな悩みを  
解決します!!

ハンドル部が長いので臼歯部のクラウン除去もラクラク！（実寸大）



左右非対称の刃部で  
さまざまな部位の  
クラウン除去に使用できます。

握りやすく力が入る六角形状ハンドル！  
しかも中空ハンドルだから軽量。  
手指の疲労を軽減します。

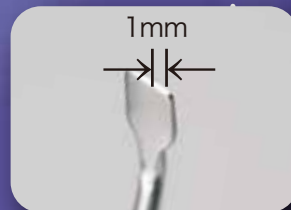

刃部先端の幅が約1mm。  
バーでの切削量1mmでOK！  
クラウン除去時間を短縮し、  
バーの切削量も軽減できるから  
バーも長持ち！

### ◎使用方法



図1●術前



図2●クラウンカッター H34 にて  
約1mm幅の切れ込みを入れる。



図3●クラウンリムーバーをさし込み、  
スリットを開くように力をかける。



図4●この症例では1～2分でクラウ  
ン除去が行えた。

## クラウン除去を簡便に短時間で行いたいから。 クラウンリムーバー #CRN134

標準価格：12,000円

◎販売名：クラウンリムーバー◎一般的名称：歯周用ホー◎届出番号：13B1X00005000172（一般）

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格は2023年3月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

取扱店名

ユニット・歯科材料・滅菌器などお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00  
(日曜・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

製造販売元：株式会社 **ヨシダ**

<http://www.yoshida-dental.co.jp>

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9



(01)02747937011140

C01592/2023年3月/PRI/@10/改