

プロフィーコントラハンドピース

8MIIA

PMTC専用
減速コントラハンドピース

スリムヘッドで術視野を十分に確保して
PMTCが行えます。

臼歯へのアクセスが
よりスムーズに行えます

ロングヘッド

ネック部が通常タイプより10mm長いロング
ヘッドタイプもございます。ヘッド部は交換で
できるので、1本でノーマルタイプとロングヘッド
タイプを使い分けることが可能です。



スリム&ラウンドヘッド

扱いやすいスリムヘッドだから、さまざまな部
位でも操作がラクラク。先端がラウンドして
いるため、軟組織を傷つけません。



プロフィーカップ&ブラシ

薄くてソフトなプロフィーカップなら、歯肉縁
下の清掃も軽いタッチでラクラク。使用部
位に応じて硬さが選べます。

DC プロフィーペースト グラッシ

グラッシは独自の研磨剤「パーライト®」を採用。
そのため、今までのような何種類かのペーストを
使用することなく、グラッシ1本でクリーニングか
らポリッシングまで行えます。

※真珠岩による天然シリカ
標準価格:2,750円



プロフィーコントラハンドピース 8MIIA
プロフィーコントラハンドピース 8MIIA ロングヘッド

標準価格:55,000円
ロングヘッド部のみ 標準価格:21,200円

販売名:コントラハンドピース8M
一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース
認証番号:20900BZZ00015000(管理 特管)
製造販売元:株式会社 吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6

販売名:プロフィーカップ 一般的名称:歯磨カップ
届出番号:13B1X00005000014(一般)
販売名:プロフィーブラシ 一般的名称:歯科予防治療用ブラシ
届出番号:13B1X00005000016(一般)
製造販売元:株式会社ヨシダ

販売名:DCプロフィーペースト グラッシ 一般的名称:歯面研磨材
届出番号:13B1X10405104700(一般)
製造販売元:エンビスタジャパン株式会社 東京都品川区北品川 4-7-35

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2026年3月現在の税別価格です。

●お問い合わせは下記まで

無断転載禁止

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月~金 9:00~17:30 ± 9:00~17:00
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937017005

C02133/2026年3月/@160/改

YOSHIDA

QUICK INSTRUMENT SERIES

クイック・インストゥルメント・シリーズ

タービンホースに接続するだけで
スケーリング・根管拡大・根管洗浄・歯面清掃が
スムーズに行えます。



ROOTY560
ルーティー560
根管拡大・洗浄・歯石除去装置



Sonic Endo
ソニックエンド
根管洗浄装置



Yully
ユリー
サブソニックブラシシステム



SALLY
サリー
エアスケーラー



Poppy
ポピー
エアスケーラー



Quick Endo SIT
クイックエンド SIT
根管洗浄・吸引・乾燥装置



QUICK JET M
クイックジェットM
歯面清掃器



豊富なラインナップ

クイック・インスツルメント・シリーズ

QUICK INSTRUMENT SERIES

ROOTY560

根管拡大・洗浄・歯石除去装置

チップの交換だけで
5種類の用途に使用できます。



スケーリング 標準装備

ソフトで優れた歯石除去効果を発揮

スケーリングチップ先端が三次元運動をするため、より優れた歯石除去効果とともに歯面への影響を抑えます。超音波スケーラーと比較して振動がソフトなので、歯に対してデリケートな除石が行えます。また、発熱も少なくスプレー水量が少なく済むため、術野を確保しやすくなっています。

スケーリングチップ




標準チップ



No.1チップ No.2チップ No.3チップ

オプションチップ

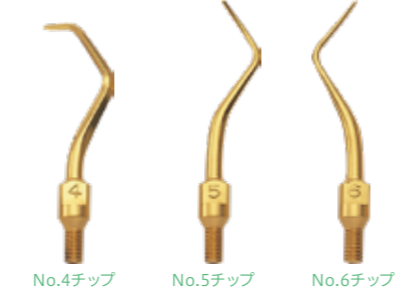

No.4チップ No.5チップ No.6チップ

※チップには摩耗が少ないチタンコーティングが施されています。

エンド 標準装備

サブソニック振動による洗浄効果

サブソニック振動によって生じる泡と攪拌作用により、根管を強力に洗浄。抜髄後の歯髄片やスメヤー層を取り除くことができます。手用ファイルなどでは届かない根尖や側枝などの洗浄も容易に行えます。

クイックホルダーU



ファイルの破折を防ぐソフトな振動

強力な洗浄パワーを持ちながらも発振はソフトなので、根管内でのファイル破折を回避するよう工夫されています。

簡単なインストゥルメント交換



クイックホルダーU
ボタンを押すだけでインストゥルメントの着脱が簡単に行えます。



Uファイルホルダーセット
専用工具でねじ式チャックを締め付けて固定します。



Uファイル (別売)
標準価格：2,000円(各6本入)

切削 オプション

フィニッシングバーホルダー Kセット

エアーによる振動切削

タービンの回転切削ではなく振動により切削するため、指でバーをガイドすることができ、滑らかで精密な切削が可能です。

ヘッドがコンパクト

タービンヘッドと比較しネックが細いため、術視野を確保できます。

手元でコントロール

パワーも水量も手元の調整リングで簡単にコントロールできます。

ルーティー専用フィニッシングバー

A、B、C 各5本入

標準価格：各 5,000円



A B C

フィニッシングバーホルダーKセット(別売)
標準価格：12,000円



DHA1、2、3、4 各5本入

標準価格：各 6,000円



歯周ポケットの洗浄 オプション

ペリオチップ

ペリオチップで優しくプラークコントロール

歯周組織に悪影響を及ぼすと言われている非付着性プラークを効率的に洗浄・除去し、プラークコントロールを行うことができます。サブソニック振動のため、優しく歯周ポケット内を洗浄できます。

ペリオチップの効果的な使用方法

ルーティ560にペリオチップをセットし、多めの水量でパワー「1~2」で使用します。振動が強いと破折する恐れがありますのでご注意ください。



RP1 (作業長14mm) RP2 (作業長16mm)

ペリオチップ(別売)



標準価格：各 10,000円 2本セット 18,700円

歯面清掃 オプション

SUSブラシ

サブソニック振動とSUSブラシで効率的な歯面清掃

3タイプの内部注水ブラシにより、複雑な形態の歯牙、叢生歯列、狭い歯間部など、回転ブラシでは難しい部位の清掃が容易に行えます。ブラシが回転しないので、頬粘膜を巻き込む心配がありません。また、歯面清掃以外にセメント除去にも使用できます。

内部注水ブラシチップ

ペースト使用時は無注水にし、研磨クリーニング後に注水できるので、シリンジに持ち替えて注水する必要がありません。ブラシは10回程度オートクレーブ滅菌し再使用できるため、経済的です。パワーは「1~2」で使用します。

SUSブラシチップ No.48

標準価格：25,000円

SUSブラシ(別売)



SUSブラシ



標準価格：4,000円(5個入)

一般的名称：歯科用エアーセーラー
認証番号：219A1BZX00075000(管理特管)
製造販売元：カボプランメカジャパン株式会社
東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー15F

SET



●セット内容

- ① 本体
- ② スケーリング用チップ (No.1)
- ③ スケーリング用チップ (No.2)
- ④ スケーリング用チップ (No.3)
- ⑤ クイックホルダーU
- ⑥ Uファイルホルダー
- ⑦ 専用チャックレンチ ⑧ チップカバー ⑨ 専用レンチ

ソニックエンド

Sonic Endo

根管洗浄装置

2,000~3,000Hzの振動と最大1ミリの振幅で
効率よく根管の洗浄が可能。

サブソニック振動

高周波数で強力洗浄効果

エアー駆動によるサブソニック振動(約2,000~3,000Hzの周波数)で、先端1mmの振幅を作り出し、効率よく根管の洗浄を行います。



ワンタッチ
プッシュボタン[®]

※ファイルの交換が、
簡単にできます。

ストッパー

注水パイプ


先端の振幅
最大1mm

最大1mmの振幅で
根管の洗浄を
効率良く行えます。


手元で繊細な調整

① パワーコントロール

パワーコントロールリングを回して
インスツルメントの先端部が
1mm以下になるように調整します。

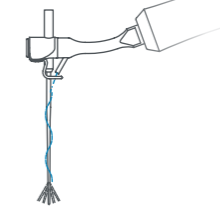

パワー強

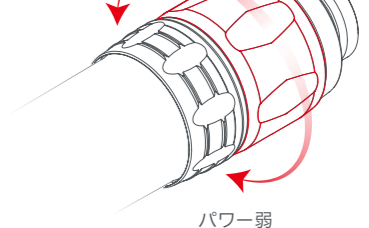


パワー弱

② 水量調整リング

水量を確認しながら水量調整リングを回し、
水がホルダー用インスツルメントに沿って
流れるように調整します。

水量少

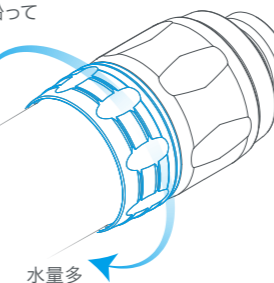

水量多

注水洗浄



薬液注入洗浄[※]



※根管洗浄用薬液を併用した洗浄

扱いやすい設計

ファイル交換の手間を軽減

ワンタッチ式プッシュボタンを採用したファイルホルダーなので、ファイル交換が簡単にできます。


コンパクトヘッド

ヘッド部が小さく非常にコンパクトなので、繊細な治療時の術視界を妨げにくい設計です。


● 推奨ファイル(別売)

クリーニングチップK PeeK

汎用性の高い
2種類の長さの製品をご用意。
ストッパーを活用することで、
作業長の確認も容易に
行うことができます。

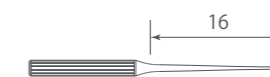

16

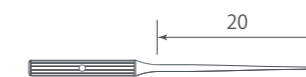

20

クリーニングチップK PeeK L16 10本入

クリーニングチップK PeeK L20 10本入


標準価格：15,000円



SET



③

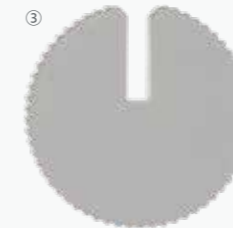

①



● セット内容

- ① 本体
- ② ホルダー-K01
- ③ 専用レンチ

ユリー Yully

サブソニックブラシシステム


細くて軽量で使いやすく、手指への負担が少ない。
振動効果で確かな洗浄力を発揮します。



歯面の清掃、インプラント周りのデリケートゾーン、
矯正装置のプラーク除去に“ちから”を発揮します。

サブソニックによる洗浄効果

注水下で水流と振動の音波効果（サブソニック振動）によって起きる泡により、バイオフィルムの破壊や洗い流し作用を生かしたプラーク除去、無水下でポリッシングペーストを使用した細部のステイン除去など、幅広い診療に使用できます。

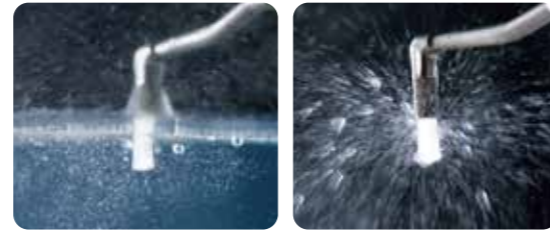


使いやすい角度のブラシチップ

長めのネックと垂直に近いヘッド角度により、最後臼歯遠心部や隅角部など、さまざまな部位にアクセスしやすくなりました。




各種パーツは滅菌可能

本体はシリコングリップを装着したままオートクレーブ滅菌が可能です。但し乾燥工程にはかけないでください。
※ユリーブラシは滅菌10回程度が目安です。

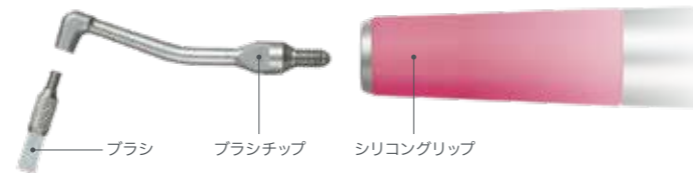

カラフルなグリップ

3色のシリコングリップを標準装備。個々のハイジニストそれぞれがMyハンドピースを認識できます。

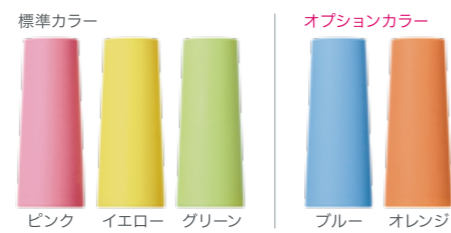

●シリコングリップ単品
標準価格：各2,100円（3個入）

ユリーブラシ（歯面清掃用ブラシ）

平滑面の清掃にはFブラシ。歯肉溝や隣接面、小窩裂溝の清掃にはMブラシが適しています。



●ユリーブラシ単品
標準価格：各4,250円（5個入）

デンタルハイジニストのPMTCを効率よくサポート。
使いやすさとパワーが自慢の「ユリー」です。

辺縁歯肉部の洗浄



根面露出部の清掃



ラミネートベニアや
ポーセレンのメンテナンス



余剰セメント除去



根面板周囲の洗浄



矯正装置のプラーク除去



コア接着時における根管口の洗浄やレーザー治療の際など
ドクターの治療にもお役に立ちます。

コア接着のための根管口洗浄




レーザー治療の後処理



修復物装着前の清掃



SET

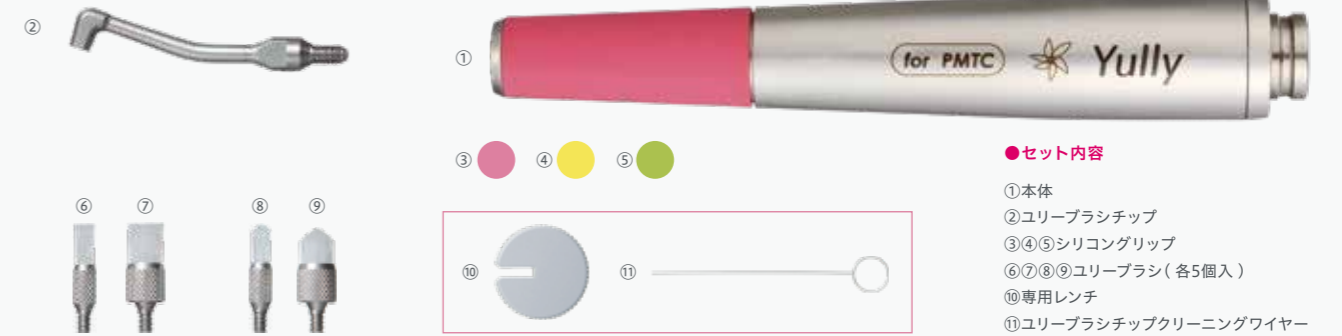

●セット内容

- ①本体
- ②ユリーブラシチップ
- ③④⑤シリコングリップ
- ⑥⑦⑧⑨ユリーブラシ（各5個入）
- ⑩専用レンチ
- ⑪ユリーブラシチップクリーニングワイヤー

サリー

SALLY


エアスケーラー

不快な振動音を大幅カットし
エアーと水で駆動するソフトなスケーリング。

スケーリングに **標準装備**


歯面への刺激と痛みを抑えて患者さんに
優しいルートプレーニングが可能に

従来のエアスケーラーに比べチップ先端の最大振幅を
約1/3*に抑制。このため、痛みの少ない治療とともに歯面への
影響を最小限にしました。しかもスーパーソニックだから
効率の良いスケーリングが行えます。*当社製品比

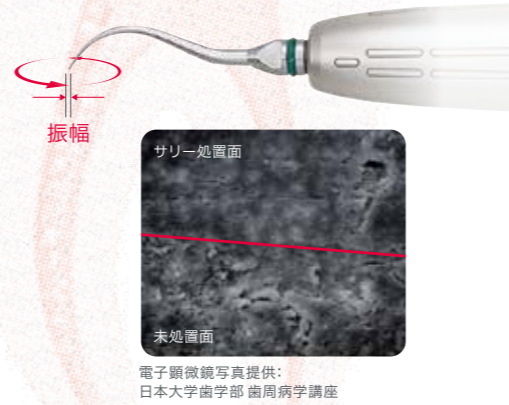


電子顕微鏡写真提供：
日本大学歯学部 歯周病学講座

標準チップ 標準価格：各8,750円

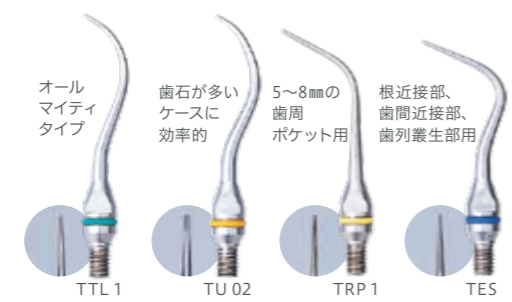

オプションチップ 標準価格：各9,550円

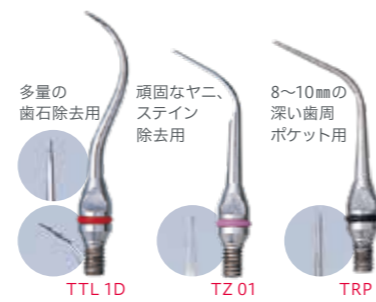

根管洗浄に **オプション**

サブソニック振動による強力な洗浄効果

根管内に残った切削粉などをスーパーソニックの力できれいに洗浄。

Uファイル用ホルダー・
H03セット(別売)
・Uファイル用チャック
・ホルダーH03
・専用レンチ

標準価格：12,400円



K3用ホルダー・H02セット(別売)
・K3ファイル用チャック
・ホルダーH02
・専用レンチ

標準価格：11,400円
(エンジン用ファイル各種が使用できます)



SET



●セット内容

- ①本体
- ②スケーリングチップ4本(TTL1/TU02/TRP1/TES各1本)
・専用レンチ
・チップカバー
・チップ消耗ガイド

ポピー

Poppy

エアスケーラー


やさしさがカタチになった
コンパクトなエアスケーラー。

短い・軽い

操作性がよいショートハンドル

全長が短いので小さい手の方でも操作しやすく、
かつ軽量なので細かな操作が可能です。

全長81mm、重量49g(ポピー-Yの場合)

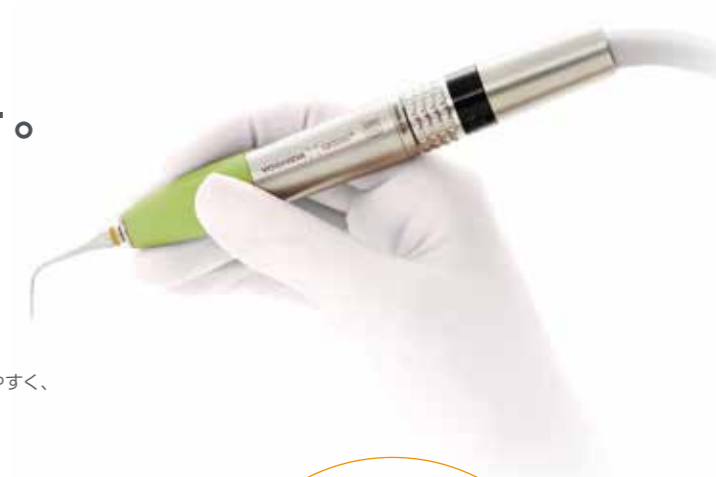

不快な振動音をカット

歯面への刺激と痛みを抑えて
患者さんに優しいスケーリングが可能に。

当社製品「エミー」に比べチップ先端の最大振幅を約1/3*に抑制。
*当社製品比

患者さんが嫌がる不快な振動音を大幅カット*。

*当社製品「エミー」と比較



カラフルなグリップ


標準カラー(ピンク・イエロー・グリーン)



オプションカラー(ブルー・オレンジ)



さまざまな症例に

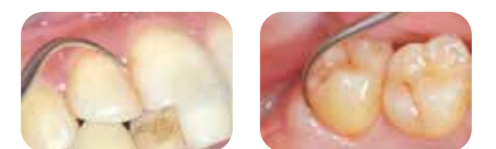

歯間部の歯石および
着色除去

歯頭部の歯石除去



歯面の着色除去

SET



●セット内容

- ①本体
- ②標準装備チップ3本(TRP1/TES/TTL1各1本)
- ③専用レンチ
- ④シリコングリップ



クイックエンドSIT


Quick Endo SIT

根管洗浄・
吸引・乾燥装置

根管治療における洗浄・吸引・乾燥の
3ステップが一気に行えます。

注水・洗浄


強力な水の還流効果で根管内の残渣を洗浄
注水と吸引がはじまると根管内で水の還流が発生し、根管内の残渣(切削粉や血液、膿、滲出液等)を効果的に洗浄していきま

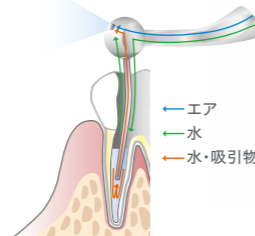

吸引・乾燥

根管内の乾燥はわずか2~3秒で完了

ユニット側で注水を止め、エアーのみによる吸引で根管内を約2~3秒で乾燥できます。ペーパーポイントは完全な乾燥確認のためにお使いください。

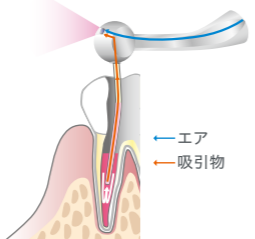

従来の「クイックエンド」をお使いの方へ「クイックエンド SIT(スリムインサートチューブ)」に交換できるキットをご用意しています。

スリムインサートチューブ 単品
標準価格：6,800円(100本入)

スリムインサートチューブ
ノズルリペアキット
標準価格：3,600円

SET



●セット内容

- ①本体
- ②ヘッド部2個
- ③スリムインサートチューブ20本
 - ・クリーニングワイヤー
 - ・予備Oリング(大)2個
 - ・予備Oリング(小)2個

1台3役で、根管治療における
洗浄・吸引・乾燥を一気に行えます。

クイックジェットM

QUICK JET M

歯面清掃器

ジェットストリームとQパウダーの使い分けで
歯面清掃の幅がさらに広がる。


ステイン除去

白い歯、すぐできます

クイックジェットMは清掃用パウダー・水を含むジェットストリームを噴射することによって、短時間でタバコのヤニ、茶渋、ステイン、プラークを取り除きます。

人間工学を追求した造形美(フォルム)

クイックジェットMはパウダーを上部に配置、手にフィットするグリップデザインを採用し使用中の安定感を向上させました。

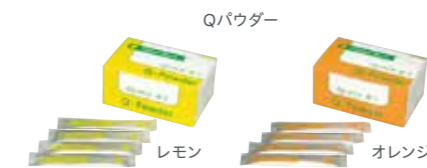

標準価格：各6,000円



標準価格：4,900円

Lunosプロフィーパウダー
ジェントルクリーン



標準価格：5,000円



舌側面ステイン除去

プラーク除去

歯肉を傷つけない、確実にプラークを除去
矯正器具周辺のクリーニングが難しい部位や、歯肉炎による炎症があるケースでも安心してご使用することができます。



矯正装置周辺の清掃(術後)



歯頸部のプラーク除去

SET



アイボリー
ホワイト

●セット内容

- ①本体
- ②ノズル
 - ・Qパウダーレモン(10g×36袋)
 - ・クリーニングワイヤー1本
 - ・ヘッド部Oリング(予備)1個
 - ・パッキン(予備)1個
 - ・Qドレープ3枚


販売名:Qパウダー
一般的名称:歯面研磨材
届出番号:13B2X00043000001(一般)
製造販売元:株式会社ミクロン

販売名:Qパウダー プラス
一般的名称:歯面研磨材
届出番号:13B1X00005000246(一般)

販売名:Lunos プロフィー パウダー
一般的名称:歯面研磨材
届出番号:13B1X00005000252(一般)
製造販売元:株式会社ヨシダ

ダイレクト
カップリングタイプ

クイック・
インストゥルメント・
シリーズ

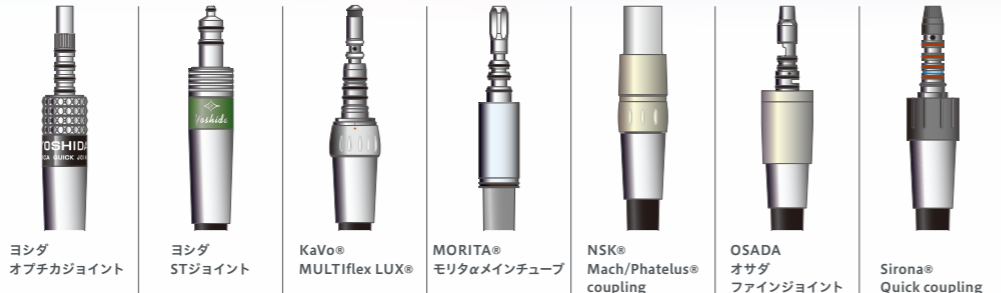

ヨシダ オプテカジョイント
ヨシダ STジョイント
KaVo® MULTIflex LUX®
MORITA® モリタαメインチューブ
NSK® Mach/Phatelus® coupling
OSADA オサダ ファインジョイント
Sirona® Quick coupling




EMMY560
エミー560

エミー560
一般的名称：歯科用エアスケーラ
認 証 番 号：20700BZZ00044000(管理 特管)
製造販売元：株式会社ミクロン

光無 エミー560
エミー560ST
標準価格：170,300円

光付 エミー560-LUX
標準価格：231,000円

ROOTY560
ルーティー560

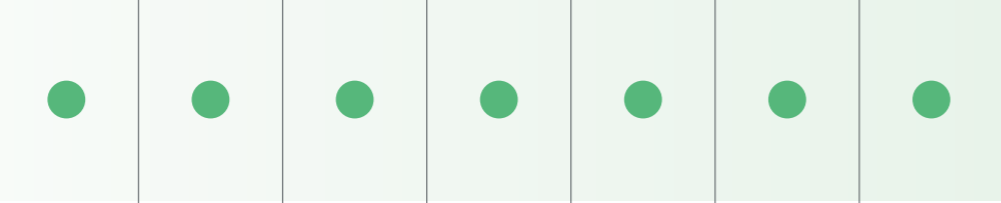


ルーティー560

一般的名称：歯科用エアスケーラ
認 証 番 号：20700BZZ00045000(管理 特管)
製造販売元：株式会社ミクロン

光無 ルーティー560-Y-Neo
ルーティー560-YST-Neo
ルーティー560-K-Neo
ルーティー560-M-Neo
ルーティー560-N-Neo
ルーティー560-OS-Neo
ルーティー560-S-Neo
標準価格：208,000円

光付 ルーティー560-YL-Neo
ルーティー560-KL-Neo
ルーティー560-ML-Neo
ルーティー560-OSL-Neo
ルーティー560-SL-Neo
標準価格：269,000円

Sonic Endo
ソニックエンド

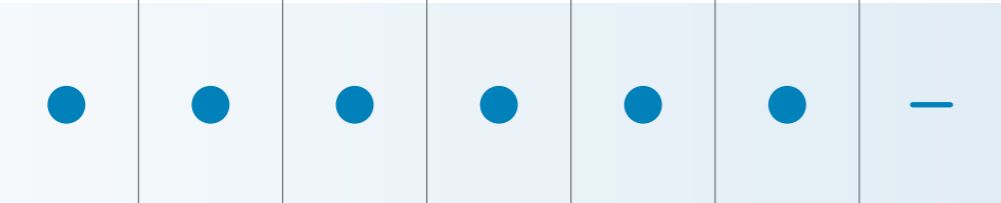


ソニックエンド

一般的名称：歯科用根管拡大装置
認 証 番 号：229AKBZX00004000(管理 特管)
製造販売元：株式会社ミクロン

ソニックエンド エアドライブY
ソニックエンド エアドライブYST
ソニックエンド エアドライブK
ソニックエンド エアドライブM
ソニックエンド エアドライブN
ソニックエンド エアドライブOS
標準価格：208,200円

Yully
ユリー

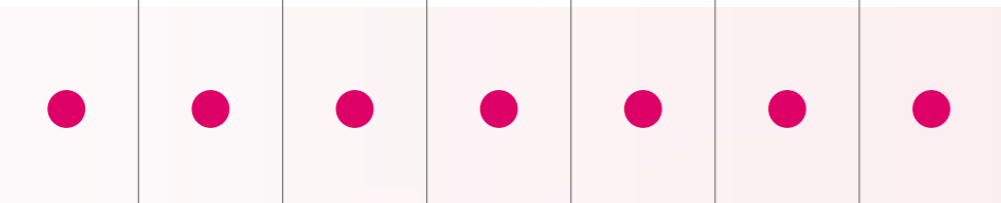


ユリー

一般的名称：歯科用エアスケーラ
認 証 番 号：226AKBZX00111000(管理 特管)
製造販売元：株式会社ミクロン

ユリー
ユリーST
ユリーK
ユリーN
ユリーM
ユリーS
ユリーOS
標準価格：123,900円

SALLY
サリー

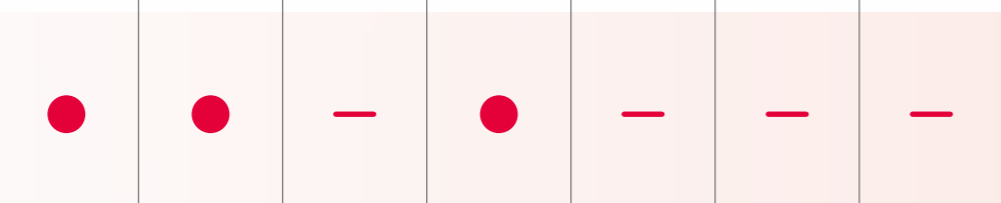


サリー

一般的名称：歯科用エアスケーラ
認 証 番 号：21400BZZ00149000(管理 特管)
製造販売元：株式会社ミクロン

サリー
サリーST
サリーM
標準価格：195,500円

Poppy
ポピー

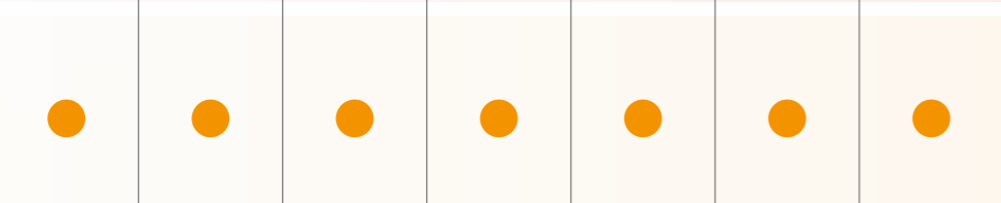


ポピー

一般的名称：歯科用エアスケーラ
認 証 番 号：231AKBZX00013000(管理 特管)
製造販売元：株式会社ミクロン

ポピーY
ポピーYST
ポピーK
ポピーM
ポピーN
ポピーOS
ポピーS
標準価格：97,700円

Quick Endo SIT
クイックエンドSIT

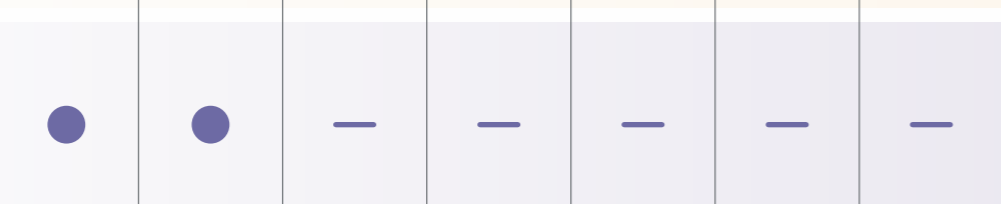


クイックエンドSIT

一般的名称：歯科根管洗浄吸引乾燥装置
認 証 番 号：21900BZX00751000(管理)
製造販売元：株式会社ミクロン

クイックエンドSIT
クイックエンドSIT-ST
標準価格：124,100円

QUICK JET M
クイックジェットM

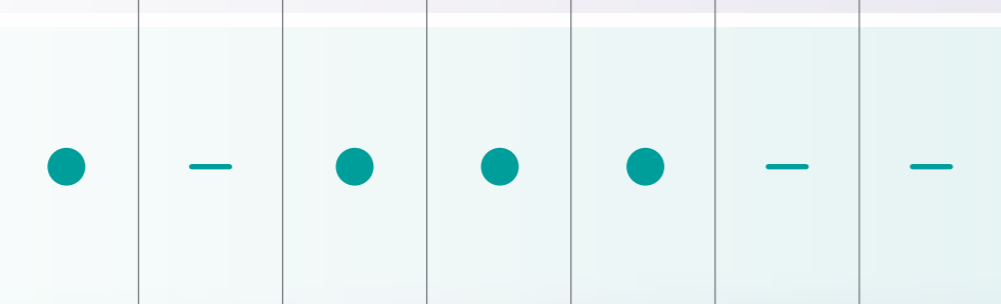

クイックジェットM

一般的名称：能動型機器接続歯面清掃用器具
認 証 番 号：21900BZX00750000(管理)
製造販売元：株式会社ミクロン

クイックジェットM ブラック
クイックジェットM アイボリー
クイックジェットM-K アイボリー
クイックジェットM-M アイボリー
クイックジェットM-N アイボリー
標準価格：156,000円

◎ KaVo® 及びMULTIflex LUX® は、Kaltenbach&Voight GMBH & CO.KGの商標又は登録商標です。
◎ Sirona® 及びQuick couplingは、Sirona Dental Systems GMBHの商標又は登録商標です。
◎ NSK® 及びMach / Phatelus® は、株式会社ナカニシの商標又は登録商標です。
◎ MORITA® 及びモリタαメインチューブは、株式会社モリタ製作所の商標又は登録商標です。
◎ オサダファインジョイントは、長田電気工業株式会社の商標又は登録商標です。