

タービンやマイクロモーターハンドピースの

# メンテナンスの お悩みを解決!

私が注油するより、  
早く確実に  
注油してくれる!

使用は簡単なので  
毎日のメンテナンスが  
楽になりました。

チャック部への  
注油も簡単です。

自動注油でタービン、  
ハンドピースを  
よりよい状態に  
保ちます。



最短 **15**<sup>\*</sup>秒!  
タービン1本を  
自動注油

※タービンの場合

マイクロモーターハンドピース  
の場合は85秒(ライトモード)、  
145秒(ヘビーモード)が標準  
作業時間です。



スプレー注油の場合と違って、  
スタッフによって  
スプレー時間やスプレー方法の  
ばらつきがなくなり、  
しっかり注油できるので  
安心です!



ハンドピース自動注油システム

# コッシュケア<sup>プラス</sup>+

# ハンドピースのトラブル予防に、 自動注油システムで簡単・確実なメンテナンス。

シンプル操作で、簡単に確実なハンドピースの注油作業が可能です。



ハンドピースをセット



フィルターを装着し扉を閉める



セレクトボタンで注油するハンドピースを選んで、  
スタートボタンを押すだけで操作完了

どなたでも  
ラクラク、  
カンタン操作!



注油から余分な油の除去まで、自動で行えます。

1

ハンドピースを  
セットします

2

注油

オイルと  
エア圧力で  
隅々まで注油

3

エアブロー

ハンドピース内の  
余分な油を排出

タービン ——— 15秒  
マイクロモーター — 85秒〜  
で注油完了!

+

マイクロモーターハンドピース  
エアブロー調整モード

マイクロモーターハンドピース内の  
オイル抜き時間を35〜110秒で調整

チャック用ノズル



付属のチャック清掃ノズルを  
使用(手動)し、チャック内部の  
汚れや摩耗粉を除去できます。

ハンドピースを同時に4本セット可能



オイルボトル

従来のスプレーオイル使用時に比べ1回  
あたりのオイル使用量が少なく、大幅に  
コストが抑えられます。

- スプレーオイル  
1回 — 20円
- フレッシュケア プラス  
1回 — 4.3円

※交換式オイルボトル  
500mL/6,600円



オイル飛散防止  
フィルター

注油オイルの飛散を軽減します。

使いやすい前面ドア

ハンドピースの出し入れがやすく、  
お手入れも簡単。

フレッシュケア<sup>プラス</sup>

フレッシュケア プラス仕様

- 装着本数…ハンドピース4本
- 注油時間…タービン: 15秒

マイクロモーターハンドピース: 85秒(ライトモード)  
145秒(ヘビーモード)

- 供給エア圧力…0.4~0.6Mpa
- 付属品カップリング…タービン用2個、  
マイクロモーターハンドピース用2個、チャック用ノズル1個
- オイルタンク容量…500mL(タンク毎交換)

- 電源電圧…AC100V 50/60Hz
- 消費電力…30VA
- 寸法…W280×D275×H308mm
- 重量…5.9kg

オプション・別売品

- オイルボトル
- タービン用アダプター(ST)
- マイクロモーターハンドピース用アダプター
- エアースケーラー用アダプター(LUX)
- エアースケーラー用アダプター(ST)

標準価格 198,000円

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格は2023年6月現在の税別価格です。

禁無断転載

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシタ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月~金 9:00~17:30 ± 9:00~17:00  
(日曜・祝祭日を除く)

●取扱店名



(01)02747937014851

C01923/2023年6月/PRI/5/②0/改