



## ■ ミニダム

ピンポイントでスピーディな防湿。



# ミニダム

## ピンポイントでスピーディーな防湿




ミニダムはスピーディーかつ簡単に装着でき、患者さんに痛みや不快感を与えません。シリコン製シートが施術部を防湿しながら、歯間部・歯頸部歯肉をしっかり保護します。

ミニダムは2歯分の穴に歯を通すだけで、クランプを使わずに装着が可能です。

### 特長

- ・ 小臼歯・大臼歯用の簡易防湿材です。  
※前歯部には適用できません。
- ・ 歯面コーティング材アイコン使用時の簡易防湿に適しています。
- ・ ラテックスフリーなので、ラテックスアレルギーの方にも安心してお使いいただけます。

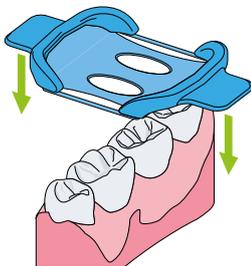

ミニダムを左右に引き伸ばし、歯肉方向に押し下げます。



ミニダムを歯頸部に合わせて装着します。



クランプ無しでしっかりと固定されます。



### ミニダム

セット内容 : 20個入  
標準価格 : 5,300円(税別)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。2025年7月現在の価格です。

禁無断転載

◎販売名:ミニダム  
◎一般的名称:歯科用ラバーダム  
◎届出番号:13B1X00005000213(一般)

◎製造販売元:  株式会社 **ヨシダ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9  
TEL.03-3845-2931(器材部)

◎製造元:DMG社(ドイツ)

●お問い合わせは下記まで



(01)02747937014196  
C01857/2025年7月/@20/改