

デントクラフトから1液型ボンディング材誕生。



●デントクラフト Aボンド リフィル

歯科用象牙質接着材

デントクラフト Aボンド

DENTCRAFT A-bond

1 Step

DENTCRAFT®

デントクラフト Aボンドは
セルフエッチングプライマーとボンディングの機能を備えた
1液型ボンディング材。

●3液型ボンディング材



●デントクラフトAボンド



●デントクラフト Aボンド キット

デントクラフト Aボンド キット

●一般的名称: 歯科用象牙質接着材 ●販売名: デントクラフト Aボンド ●認証番号: 225ACBZX00056000 (管理医療機器)
●セット内容: ◎5mL×1本 ◎アクセサリー: 混和皿×1枚、ブラシホルダー×1本、ブラシチップ×50個 ●標準価格: 17,600円 (税込)

デントクラフト Aボンド リフィル

●内容: ◎5mL×1本 ●標準価格: 15,730円 (税込)

YOSHIDA

デントクラフト Aボンドの特長と物性

1液型ボンディング材

手間も時間もかからないので、多忙な日常臨床により適したシステムです。

優れた接着性能



実際の口腔環境に近いと言われているサーマル試験後でも、エナメル質・象牙質ともに高い接着強度を実現しました。

10μm以下の被膜厚さ


歯質とボンディング層の境界が目立たず、審美的にもより優れています。

液切れのよいノズル

液垂れにくいノズルなので必要な量だけ採取でき、経済的にも優しくお使いいただけます。

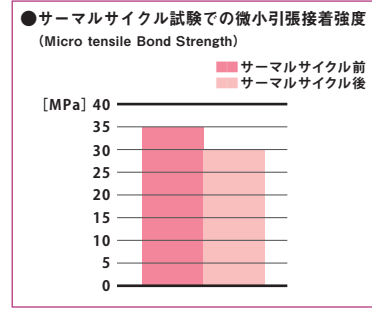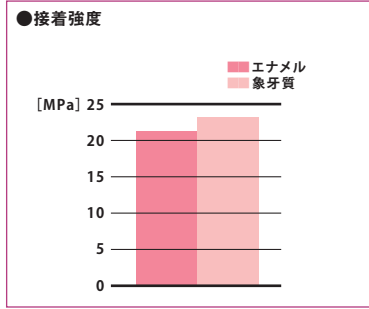


Vericom R&D Center ISO/TS11405 Seoul National University

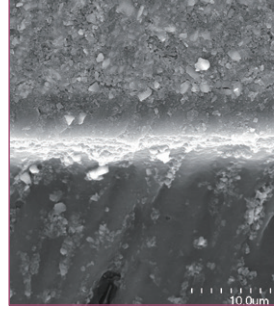


デントクラフト Aボンドの使用方法ステップ


※お使いにならない時は、フタをしっかりと閉め、冷蔵保管(2~8℃)をお願いします。

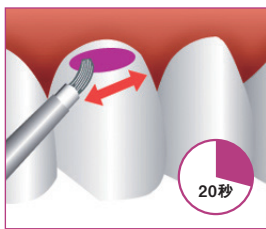

ボンディング材を歯面に20秒間塗布します。

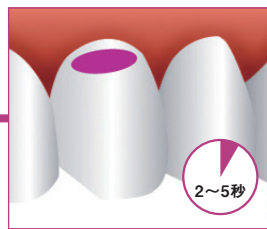

2~5秒間強圧エアブローでボンディング材をうすく広げ、溶剤を揮発させます。

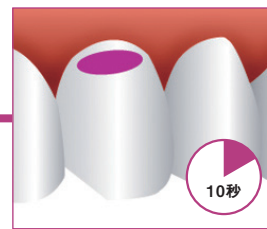

光重合器を用いて、10秒間照射します。
※光照射器の光強度が400mW/cm以上の光重合器を使用した場合。

関連製品のご紹介

光重合型歯科用コンポジットレジン デントクラフト ファインフィル



デントクラフト ファインフィル シリンジキット

- 一般名称: 歯科用充填材料キット
- 販売名: デントクラフト ファインフィル
- 認証番号: 224ACBZX00061000 (管理医療機器)
- セット内容: ①4g入シリンジ×5本 (A1, A2, A3, A3.5, B2 各1本)
- ②デントクラフト Dボンド×5mL×1本 ③デントクラフト ファインエッチ×3mL×1本
- ④アクセサリ: 湿和皿×1枚、湿和紙×1セット、ブラシチップ×30本、ブラシホルダー×1本、ディスプレイザルチップ (デントクラフト ファインエッチ用×10本)
- 標準価格: 28,600円 (税込)

デントクラフト ファインフィル シリンジ

- セット内容: ①4g入シリンジ×2本
- シェード: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, A20, A30, I, P, E
- 標準価格: 各4,840円 (税込)

光重合型歯科用フロアブルコンポジットレジン デントクラフト ファインフロー



デントクラフト ファインフロー シリンジキット

- 一般名称: 歯科用充填用コンポジットレジン
- 販売名: デントクラフト ファインフロー
- 認証番号: 225ACBZX00014000 (管理医療機器)
- セット内容: ①2g入シリンジ×4本 (A2, A3, A3.5, B2 各1本)
- ②ディスプレイザルチップ×20本 ③ホルダー×1個
- 標準価格: 12,100円 (税込)

デントクラフト ファインフロー シリンジ

- セット内容: ①2g入シリンジ×2本
- シェード: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, A20, A30, I
- ディスプレイザルチップ×20本
- ホルダー×2個
- 標準価格: 各4,840円 (税込)

歯科用充填材料キット (歯科用象牙質接着剤) デントクラフト Dボンド

2ステップタイプ

デントクラフト Dボンド

- 一般名称: 歯科用充填材料キット
- 販売名: デントクラフト ファインフィル
- 認証番号: 224ACBZX00061000 (管理医療機器)
- セット内容: ①5mL×1本
- 標準価格: 8,030円 (税込)



歯科用充填材料キット (歯科用エッチング材) デントクラフト ファインエッチ

デントクラフト
ファインエッチは
リン酸37%のエッチング材。

デントクラフト ファインエッチ エコノミーキット

- 一般名称: 歯科用充填材料キット
- 販売名: デントクラフト ファインフィル
- 認証番号: 224ACBZX00061000 (管理医療機器)
- セット内容: ①3mL×5本
- ②アクセサリ: ディスボーザルチップ×20本
- 標準価格: 5,390円 (税込)



ハイパワーLED照射器 DC ブルーレックスアルファ



- 一般名称: 歯科用光照射器
- 販売名: DCブルーレックスアルファ
- 届出番号: 13B1X00005000205 (一般医療機器 特管)
- 標準価格: 118,800円 (税込)



※色調は印刷のため現品と異なることがあります。また、仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

製造販売元: 株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月~金 9:00~19:00 ±9:00~17:00
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937011621

C01613/2021年2月/@80/PRI/1/改