

12 HIGH SPEED  
MINUTES

わずか12分。

二重チャンバー採用で  
乾燥工程がないため  
高速滅菌が可能。



# DENTCLAVE HIGH SPEED STEAMER

高圧蒸気滅菌器

DCデントクレーブ **ハイスピードスチーマー**

急いで滅菌したい。そんな時でも  
乾燥工程がない「ハイスピードスチーマー」なら  
わずか12分で高速滅菌が可能です。

**DENTCLAVE**  
HIGH SPEED STEAMER




●ハイスピードでたっぷり滅菌できます。

●**わずか12分で高速滅菌が可能です。**  
(132℃で滅菌の場合)

二重チャンバーの採用で、12分の高速滅菌が可能になりました。

●二重チャンバー断面

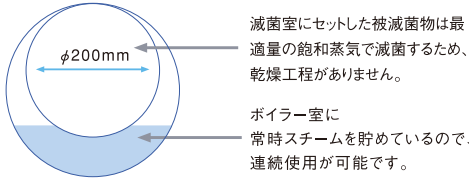

滅菌室にセットした被滅菌物は最適な飽和蒸気で滅菌するため、乾燥工程がありません。

ボイラー室に常時スチームを貯めているので、連続使用が可能です。

●連続使用が可能です。

ボイラー室に貯蔵されたスチームにより連続使用が可能です。


●いつでも滅菌が可能な状態でスタンバイ。

電源を常時ON状態にしておくことで、いつでも滅菌可能です。


●専用蒸留水で清潔な滅菌が行えます。

滅菌専用蒸留水「DCスピード・ゾル」をご用意しています(別売)。蒸留水を再使用しないので清潔な滅菌が行えます。

●本体寸法図 (mm)

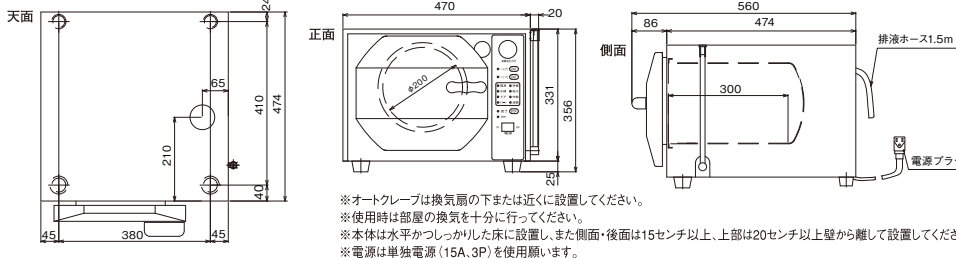


●操作パネル

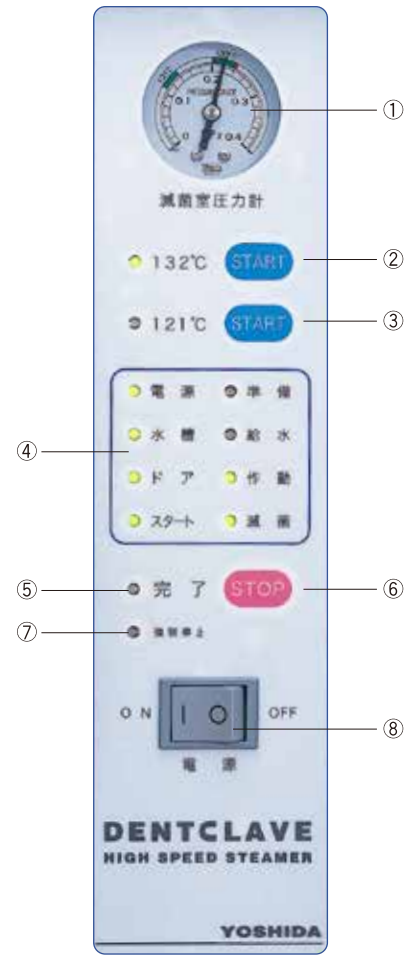


①滅菌室圧力計②132℃スタートキー③121℃スタートキー④各動作表示ランプ⑤滅菌完了ランプ⑥ストップキー⑦強制停止ランプ⑧電源スイッチ

●アミトレイ・専用ハンドル

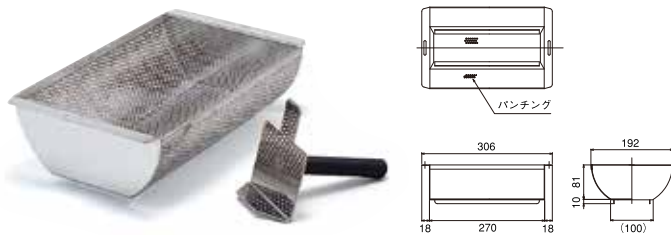

●排水ボトル (mm)

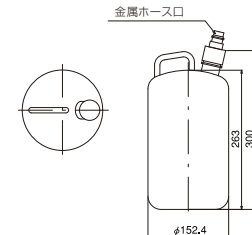

●専用蒸留水DCスピード・ゾル

滅菌には専用の蒸留水をご使用ください。水道水には溶質物が含まれているため、配管にスケールを付着させ故障の原因となります。



◎標準価格:1,400円(内容量:4L)

◎仕様 ●滅菌温度:121℃/132℃ ●外形寸法:W490mm×D560mm×H356mm ●缶体有効寸法:φ200mm×300mm ●消費電力:1.3KW(AC100V) ●収容量:丸カスト18cm×2 / アミトレイ ●本体重量:37kg ●標準価格:880,000円 ●販売名:DCデントクレープハイスピードスチーマー ●一般名称:小型未包装品用高圧蒸気滅菌器 ●承認番号:21900BZX00252000(管理 特管)  
 ◎付属品 ●アミトレイ・1個 ●専用ハンドル・1個 ●スノコ・1枚 ●排水フィルター・1個 ●排水ホース・1本 ●排水ボトル・1本 ●専用蒸留水DCスピード・ゾル・1本  
 ※本体の他に付属の排水ボトルを設置する必要があります。

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格は2024年3月現在の税別価格です。

禁無断転載

●取扱店

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月~金 9:00~17:30 ± 9:00~17:00  
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937012468