

# インプラント メインテナンス専用 開発されました。



## フッ素含有なし、RDA9.8のインプラント専用ペースト

高濃度のリン酸フッ化ナトリウムなどは補綴修復物を変化させる可能性があります。

また、粗い研磨剤はインプラント(チタン)を傷つけることが懸念されます。

インプラントのメインテナンスには

フッ素含有なし、RDA9.8の

専用ペーストを用いることが大切です。



# インプラント ペースト

標準価格:1,880円(45g入)

●一般的名称:歯科用研磨器材●販売名:インプラント ペースト●届出番号:27B1X00039104500(一般医療機器)

●製造販売元:カボデンタルシステムズジャパン株式会社 大阪府八尾市神武町2番24号



# インプラントのメンテナンスが大切！



- ・ 超高齢社会だから
- ・ インプラントの患者さんが増えているから
- ・ 予知性の高いインプラント治療をしたいから



3ヶ月ごとにメンテナンスに来院される患者さん。



口腔内所見を行い、必要に応じてX線撮影を行っています。



チタン体が露出しているため、インプラントペーストとPMTCスターターキット#105カップを用い(回転数は低速)メンテナンスを行います。




細部はプロフィーポイントを用います。




## 本当にインプラントに使っても大丈夫？

2社のインプラント体のネック部を ①歯磨ペースト ②天然歯用PMTCペースト ③インプラントペースト の3種類のペーストをそれぞれ2,000回転で研磨し、インプラントネックの表面変化を電子顕微鏡で分析した結果、インプラントペーストはクリーニング効果とインプラント表面の面粗さの減少においてバランスがとれていることがわかりました。(当社比)


① 歯磨ペースト (実験後)

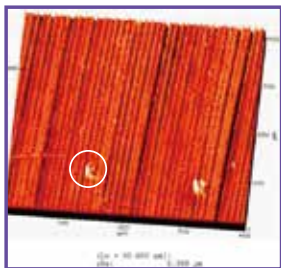

② PMTCペースト (実験後)

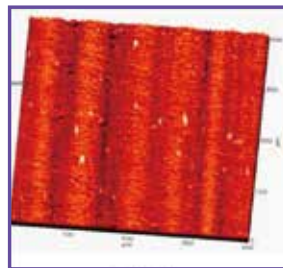

③ インプラントペースト (実験後)

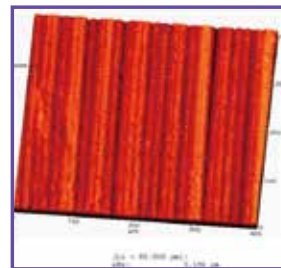

### チタン製 インプラント専用スケーラー インプラントスケーラー-J

- 標準価格:各12,800円
- 種類:6種類
- インプラントスケーラー
- 一般的名称:歯科用スケーラー
- 届出番号:13B1X00005000173(一般)
- 製造販売元:(株)ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9



### PMTC スターターキットIIA

- 標準価格:61,000円
- コントラハンドピース8M
- 一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース
- 認証番号:20900BZ200015000(管理 特管)
- 製造販売元:(株)ヨシダ製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6
- プロフィーブラシ
- 一般的名称:歯科予防治療用ブラシ
- 届出番号:13B1X00005000016(一般)
- 製造販売元:(株)ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9
- プロフィーカップ
- 一般的名称:歯磨カップ
- 届出番号:13B1X00005000014(一般)
- 製造販売元:(株)ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9



ソフトタイプ

ハードタイプ

### プロフィーポイント

- 標準価格:各850円
- プロフィーポイント
- 一般的名称:歯磨カップ
- 届出番号:13B1X00005000015(一般)
- 製造販売元:(株)ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格は2022年10月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月~金 9:00~19:00 ± 9:00~17:00  
(日曜・祝祭日を除く)



C0102747937010143