



速やかな止血効果。
抜歯など口腔内手術に伴う出血に、
ヘムコン デンタルドレッシング。

医療用品 4 整形用品 | 一般医療機器 綿状パッド 32572000



ヘムコン デンタルドレッシング®
HemCon Dental Dressing®

ヘムコン デンタル ドレッシング® HemCon Dental Dressing®

医療用品 4 整形用品

一般医療機器 綿状パッド 32572000

届出番号：13B1X00066000007

【禁忌・禁止】

1.再使用禁止。

[本品はガンマ線滅菌済みのディスポーザブル製品であるため。]

2.再滅菌禁止。

[医療現場での再滅菌を想定していないため。]

特徴

1. キトサンを使用した製品です。
2. 素早い止血効果が得られ、効果が持続します。
3. 生体中の凝固線溶系因子を介さずに止血効果を発揮し、自然な凝血塊の形成を促します。
4. 出血面の範囲や出血の程度により、2種類のサイズ
(10mm×12mm 厚さ:3.5mm、25mm×70mm 厚さ:1.15mm)から製品を選べます。
5. ISO10993に基づく生物学的安全性を検証しています。
6. 滅菌済みのため、必要な時にすぐ使えます。

形状、構造 及び原理等

- ◎キトサンはプラスに帯電していて、出血面に適応すると、マイナスに帯電した血液中の赤血球と血小板を引き付けます。
- ◎ヘムコンデンタルドレッシングはこの電荷特性により速やかに傷口を塞ぎ、止血効果を発揮します。
- ◎その後、生体内では血小板凝集反応により凝血塊が形成されます。
- ◎ヘムコンデンタルドレッシングは出血面において、出血口の血栓を強化します。




使用目的 又は効果

口腔内止血のために、手術等に使用する。また、一時的に口腔粘膜組織を保護する。


使用方法等

1

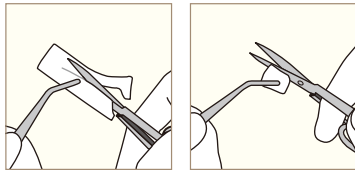


滅菌包装を開封し、本品を取り出してください。
必要であれば本品を出血部位(面)にあわせて適当な大きさに切ってください。

2

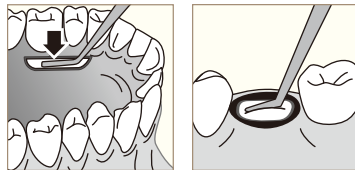

出血部位(面)に、ピンセット等で本品を適用し、しばらく押しつけてください。
この時、出血部位(面)を完全に閉鎖したり、本品を埋め込まないようにしてください。

3

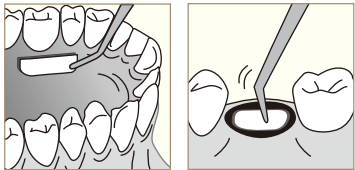

血餅により止血が得られたら、本品を必ず除去してください。

使用上の 注意

- ◎本品を留置したまま縫合しないこと。
- ◎本品使用中に過敏症状が現れた場合には使用を中止し、適切な治療を行うこと。

保管方法及び 有効期間等

室温で保管すること。
包装に表示の使用期限欄を参照のこと。
[自己認証(製造元データ)による]

包装

5枚/1箱

ヘムコン デンタル ドレッシング 標準価格
10mm×12mm×5枚： 13,000 円(税別)
25mm×70mm×5枚： 22,000 円(税別)



発売元
 **ゼリア商事株式会社**
ZERIA GROUP 東京都中央区日本橋小舟町9-7 TEL 03-3669-3901

製造販売元
 **ゼリア新薬工業株式会社**
東京都中央区日本橋小舟町10-11 TEL 03-3663-2351(代表)

お問い合わせ

販売元  株式会社 **ヨシダ**
〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問合せ： **0800-170-5541**

対応時間：月～金 9:00-17:30 土 9:00-17:00 (日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937013243

C01767/2025年5月/PRI/5/@20/改