

歯科用吸引管

# カニ्यूレ

強力吸引

静音

ゴムチップ  
不要

134℃  
〰〰〰



Powerful  
but  
Quiet

# カニューレ

1

## Powerful but Quiet

空気抵抗の少ない形状で  
強力かつ静音※での吸引が  
可能です。

※ドイツ フラウンホーファー 研究機構試験より

2

## Colorful

滅菌のタイミングごとに色を分けることができるため、  
使用されなかった器具がキャビネット等に  
残ってしまうことを防ぎます。

3

## No edges

患者さんに痛みを与えにくい  
滑らかなラウンド形状です。  
頬粘膜・舌の排除がしやすい  
デンタルミラーに似た先端形状です。

※カニューレプロテクトと比較→

## Instruction

エアロゾルが発生するところにカニューレを置き吸引します。



上顎左側臼歯部

下顎右側臼歯部

下顎前歯部

上顎前歯部

小児やお口の小さな患者さんには、  
ヘッドが小さくネックが細い  
ペティートがおすすめです。

上：カニューレプロテクト

下：カニューレペティート小児用φ16→

## Lineup

グレー イエロー ピンク ブルー ターコイズ

共通 強力吸引 静音 コムチップ不要 134℃



φ16mm  
[カラー:3色、同色5本入]  
標準価格 4,940 円

### カニューレ プロテクト




φ16mm  
[カラー:5色、同色5本入]  
標準価格 4,940 円

### カニューレ ユニバーサル



φ16mm 小児用 溝あり  
[カラー:5色、同色5本入]  
標準価格 4,300 円

### カニューレ ペティート小児用φ16

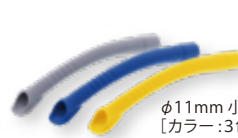


φ11mm 小児用  
[カラー:3色、同色5本入]  
標準価格 4,300 円

### カニューレ ペティート小児用φ11



### カニューレ プロフィラシス

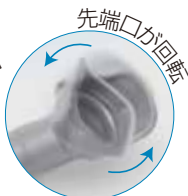

φ16mm パウダー吸引用  
[カラー:グレーのみ、4本入]  
標準価格 4,940 円

- ・バキューム口が広く、先端角度を変えられます。
- ・強力な吸引力で、歯面清掃時のパウダー吸引に適しています。

○カニューレは高圧蒸気滅菌器(134℃)で滅菌します。お手入れの際はプロフィラシスの先端部分を取り外します。※乾燥工程不可。

○使用後は、デュールデンタル製除菌液「D213インストルメント」で洗浄除菌をします。

○洗浄除菌が完了したら、カニューレの中の状態を目視確認します。付着物などがある場合は、ブラシで除去し、よくすすいで乾燥させます。

○滅菌の際、金属に当たらないように注意してください。カニューレは、患者さんの粘膜や皮膚組織に直接触れる器具(セミクリティカルBに分類)であるため、適切な洗浄・除菌・滅菌を行う必要があります。

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。  
※表示価格は2025年7月現在の税別価格です。

販売名:バキュームチップ 一般的名称:歯科用吸引管 認証番号:228AGBZX00100000(管理) 製造販売元:株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9 ※カニューレの販売名はバキュームチップです。

禁無断転載

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

●お問い合わせは下記まで

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 ± 9:00～17:00  
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937015599

C01994/2025年7月/PRI/10/@20/改