

DENTCRAFT.

Clean Mixer DM-310

アルジネート印象材自動練和器 / みきさん3

- スピーディーな練和
- なめらかな仕上がり
- 簡単操作・コンパクトボディ
- 安全機構





診療効率をアップする
スピーディーな練和を実現。
使いやすい場所に設置できるコンパクト設計。



みきさんで練和

手練和によくある気泡

簡単・スピーディー

9種類の練和時間があらかじめ記憶されているので、設置後すぐに使用できます。また練和カップに羽根がないので、清掃がとても簡単です。

なめらかで気泡の少ない練和

低速回転と高速回転の組み合わせで練和と脱泡を素早く行うので、なめらかで均一な練り上がりを実現します。

安全機構

バランスを崩した時は直ちに回転が停止するアンバランス検出機構を搭載。また、とびらを閉めないでスタートボタンを押しても作動しない安全機構内蔵で未然に事故を防ぎます。

簡単な操作パネル

- ① コース選択ボタン
- ② カップ数選択ボタン
- ③ 簡単練和ボタン
- ④ クイック練和ボタン
- ⑤ スタート/ストップボタン



③ 簡単練和

練和カップに印象材と水をいれてフタをしてそのまま本体に装着して練和スタートします。(事前に粉と水をなじませる必要はありません。)

④ クイック練和

練和カップに印象材と水を入れフタをした後数回振ってなじませたあと、本体に装着して練和スタートします。簡単練和より短時間で練和できます。

みきさん3の練和方式

あらかじめ印象材と水をなじませなくても、練和開始時に正転・反転を繰り返し、印象材を水になじませます。その後、低速回転と高速回転の組み合わせで練和と脱泡をスピーディーに行い、なめらかな仕上がりを実現。簡単練和とクイック練和2種類の練和方式を必要に応じてセレクトできます。



あらかじめ印象材の種類に合わせてコース選択とカップ数の設定を行います。



練和カップを本体にセットしてとびらを閉めます。



運転モードで簡単練和を選択し、スタートボタンを押します。



付属のスパチュラで印象材を取り出します。

みきさん3仕様

- 標準価格:325,000円
- 本体寸法:W243mm×D305mm×H325mm ●本体重量:約25kg ●電源:AC100V 50/60Hz 900VA ●練和容量:24~110g(1~4カップ)
- プログラム数:1~4カップまで各9コース、フリープログラムエリア1~4カップで1コース ●安全機構:とびら自動ロック、アンバランス検出停止機構
- ◎販売名:みきさん3 ◎一般的名称:歯科用印象材混和器 ◎届出番号:26B2X10018000042(一般)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。※石膏には使用できません。価格は2023年1月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●製造販売元:デンケン・ハイデンタル株式会社 京都府京都市山科区大宅石郡町130

●お問い合わせは下記まで

●販売元:株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

対応時間:月~金 9:00-19:00 土 9:00-17:00 (日曜・祝祭日を除く)

歯科医院様専用フリーダイヤルのため、お問合せは固定電話専用となっています。携帯電話からは03-6880-2155にお問合せください。



(01)02747937015018

C01936/2023年1月/PRI/2/@20/改