




Copy denture

for denture duplication

旧義歯の複製で治療用義歯に！

チェアサイドで製作できる低コストで精度の高いコピーデンチャー

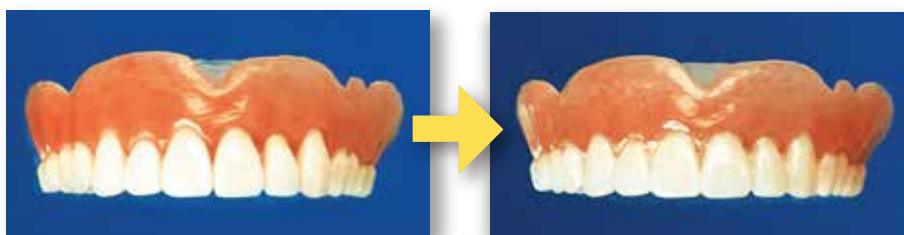

旧義歯

コピーデンチャーを用いた複製義歯

義歯複製用レジン

コピーデンチャーの特長

- 操作が容易で、短時間に完了。
- 特殊成分により床の変形が非常に少ない。
- アルギン酸印象材でもレジン表面が白濁しません。



承認番号
20300BZZ00403A01号
(管理医療機器)
(義歯床補修用レジン)

複製用シェル/別売

Copy denture

for denture duplication

義歯複製用レジン

コピーデンチャー

高齢化社会では、適応能力の低下や来院回数
の軽減を理由に、新義歯の製作よりも旧
義歯を調整して、再び使用するケースが多
くなっています。このようなケースや難症例、
悪習慣のあるケース、旧義歯を預ったり手
を加えたりすることの出来ないケースなど
には、生体に馴れ親しんだ現在の義歯を複
製し活用する方法が、最も患者にとって違
和感が少なく、術者にとってもリスクの少
ない治療法といえるでしょう。さらに、金属
床や陶歯使用義歯など、従来の常温重合レ
ジンでは修理がしにくい場合にも、複製義
歯(Duplicate Denture)により治療がおこ
なえます。そして、これらの複製義歯に各種
の義歯床裏装材を併用すれば、より効果的
な治療義歯が完成します。

●セット内容


粉 床用・・・・・・・・・・・・・200g
 歯冠用・・・・・・・・・・・・・60g
 液・・・・・・・・・・・・・200mL
 表面滑沢材・・・・・・・・・・・・・30mL
 スポイト、スパチュラ、筆、
 液計量カップ、
 粉計量兼用混和用カップ、
 歯冠色筆積用カップ、
 筆積用液カップ、

各1ヶ


別売/複製用シェル

ご使用にあたっては、あらかじめ添付
文書をお読みください。


●使用方法

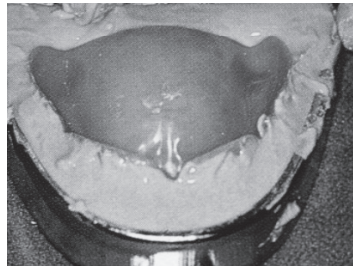


1 複製用シェル下部にアルギン酸
印象材を盛り、複製しようとする
旧義歯を埋没します。

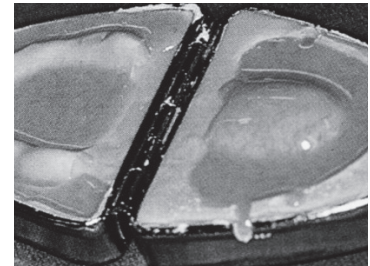


5 次に床用レジンを流し込み、ふた
をします。

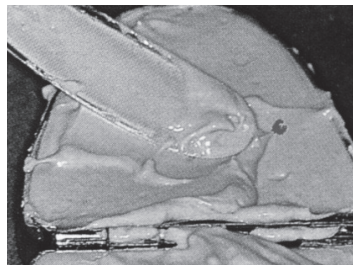

2 次に、上部シェルにアルギン酸印
象材を盛り、ふたをします。

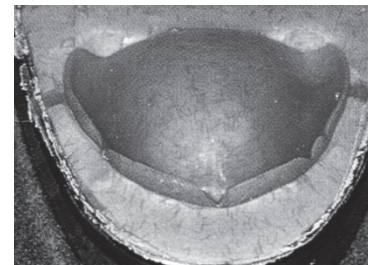


6 約20分後にふたを開き、複製義
歯をとり出します。

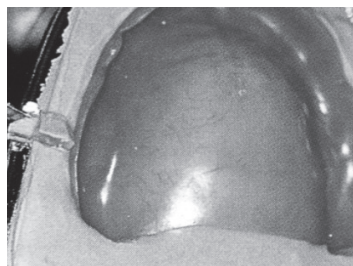


3 硬化後、ふたを開け旧義歯をはす
して複製印象の完成です。



7 バリなどを除去後、専用の表面滑
沢材を塗布します。

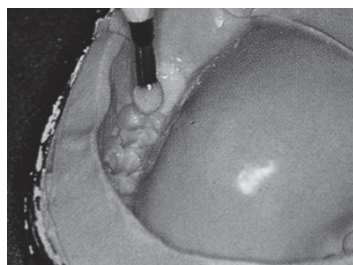

4 歯頸部にあわせて歯冠部に歯冠
用レジン筆を塗り込みます。

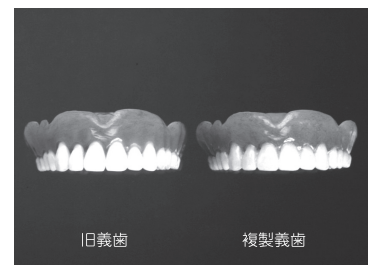

8 複製義歯の完成です。

●取扱歯科商店名

発売元



株式会社 **ヨシダ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

TEL:0120-178-148(コンタクトセンター)

http://www.yoshida-dental.co.jp/

製造販売元

龍水化学工業株式会社

〒572-0071 大阪府寝屋川市豊里町17-16

禁無断転載

CO1529/2018年10月/PRI/10/20/改



(01)02747937010631