

リプロメルト & リプロクリーン

REPRO MELT

歯石
除去



REPRO CLEAN

着色
除去



リプロメルト


- ・**わずか5~10分**
超音波洗浄で、歯石がとれる
- ・ヌメリとり、除菌も可能
- ・クラスプやレジン床を痛めにくい

リプロクリーン


- ・**わずか5~10分**
超音波洗浄で、義歯の頑固な着色がとれる
- ・除菌や義歯臭にも
- ・軟質ライニング材にも使用可能

リプロメルト 使用方法

①本剤を原液のまま補綴物全体が浸るまで容器に入れます。

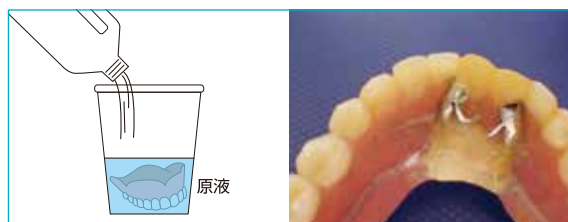

②容器ごと超音波洗浄器に5~10分間程度かけます。

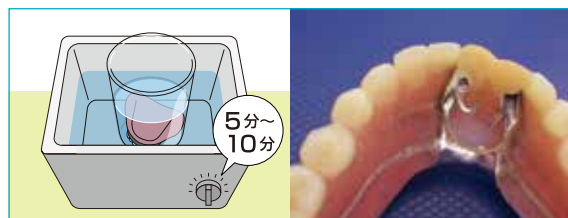


リプロクリーン 使用方法

①本剤を2倍に薄めて、充分攪拌の後、補綴物全体が浸るまで容器に入れます。



②容器ごと超音波洗浄器に5~10分間程度かけます。

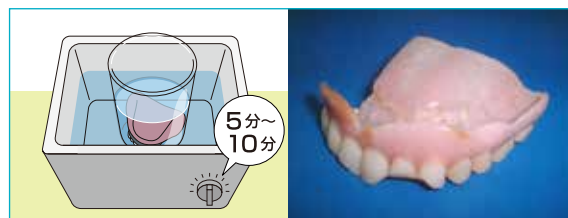

リプロメルト



用途：義歯に付着した歯石の除去
成分：リン酸、界面活性剤、その他
液性：酸性
容量：1.8L
標準価格：4,300円（税別）


リプロクリーン




用途：着色義歯の漂白、除菌
成分：次亜塩素酸ナトリウム、防錆安定剤、その他
液性：強アルカリ性(pH約12)
容量：①1.2L ②4L
標準価格：①4,700円（税別）
②13,100円（税別）

リプロメルト 使用方法


希釈せず原液で使用

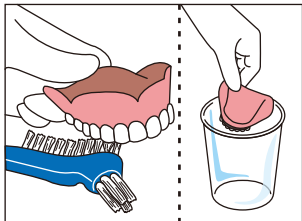


1. 補綴物表面をブラシで清掃し、フタ付きのガラス容器またはポリエチレン容器に入れます。

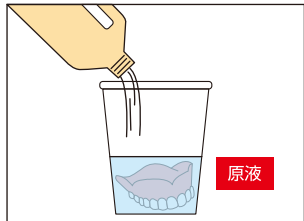


2. 本剤を原液のまま補綴物全体が浸かるまで容器に入れます。

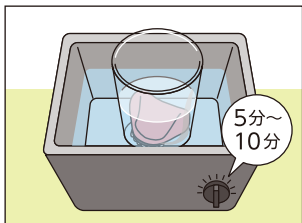


3. 容器ごと超音波洗浄器に5～10分程度かけます。
※補綴物を本剤に30分以上浸漬しないでください。金属が変質することがあります。

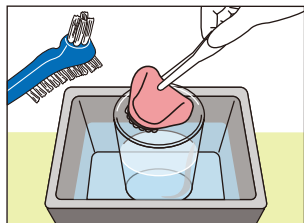

4. 洗浄後、義歯に歯石が残っている場合は、ブラシでこすり落としてください。
※汚れが残っている場合は、洗浄時間を延長してください。
※ゴーグルを着用のうえ、ピンセットまたはグローブで取り出してください。

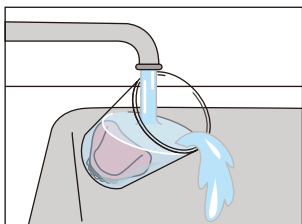

5. 洗浄液を水で充分うすめて流し、補綴物は容器のまま水で数回よくすすぎます。

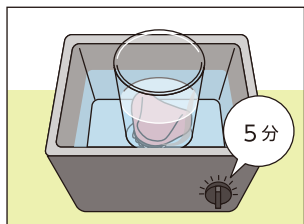


6. 新しい水を入れて5分程度超音波洗浄します。
※液は強酸性ですので、患者様に渡す前に十分に水洗してください。

⚠️ ご注意 塩素系の製品と混合すると有害なガスが発生し危険なため、絶対に混合しないこと。

リプロクリーン 使用方法


水で2倍に薄めて使用

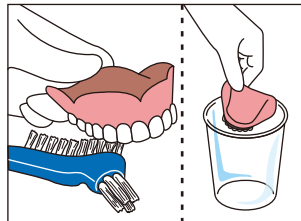


1. 補綴物表面をブラシで清掃し、フタ付きのガラス容器またはポリエチレン容器に入れます。




2. 本剤と水を1:1の割合で入れ、充分攪拌した後、補綴物全体が浸かるまで容器に入れます。

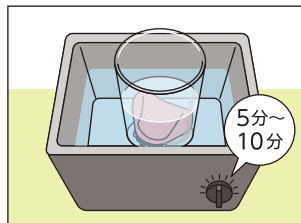


3. 容器ごと超音波洗浄器に5～10分程度かけます。
※本剤を超音波洗浄器に直接入れないでください。次亜塩素酸ナトリウムにより洗浄器の寿命を短くする恐れがあります。

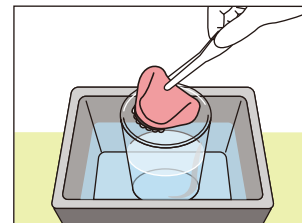

4. 着色や汚れが落ちているか確認します。
※着色が残っている場合は、洗浄時間を延長してください。ただし、長時間補綴物を入れっぱなしにしないでください。金属が劣化したり、義歯が脱色したりすることがあります。

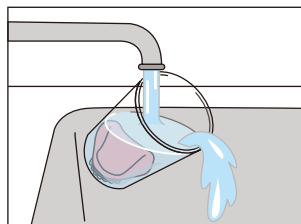

5. 洗浄液を水で充分うすめて流し、補綴物は容器のまま水で数回よくすすぎます。

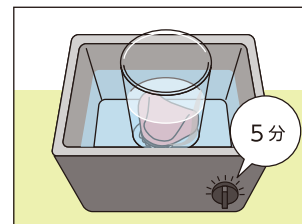

6. 新しい水を入れて5分程度超音波洗浄します。
※液は強アルカリ性ですので、患者様に渡す前に十分に水洗してください。

⚠️ ご注意 酸性の製品と混合すると有害なガスが発生し危険なため、絶対に混合しないこと。

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2023年3月現在の税別価格です。

●お問い合わせは下記まで

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 ± 9:00～17:00
(日曜・祝祭日を除く)

禁無断転載



(01)02747937017098

C02142/2023年3月/PRI/5/@20/再