

● **コピーデンチャー** (複製義歯用即時重合レジン)

承認番号 20300BZZ00403A01 (管理) 一般的名称: 義歯床補修用レジン

アルギン酸印象材と専用の複製用シェル(別売)を用いて、簡単に旧義歯を複製し治療義歯を作ることができます。

標準価格: ¥19,100(歯冠用粉60g、床用粉200g、液200mL、表面滑沢材30mL)

専用 複製用シェル (別売) 標準価格: ¥11,900



コピーデンチャー



● **ペリモールド** (床辺縁延長用即時重合レジン)

承認番号 20300BZZ01234000 (管理) 一般的名称: 義歯床補修用レジン

床辺縁に盛り上げてもたれてこず、指先で粘土のように適した形態が作れるので筋圧形成が容易で、短い床の辺縁延長が簡単にできます。

標準価格: ¥11,900

(粉70g、液50mL、ニューソフトコート6mL、シリンジ2本)



● **ダイナベースペリ** (光重合型動的リライナー)

承認番号 20900BZZ00135A01 (管理) 一般的名称: 義歯床補修用レジン

ティッシュコンが光重合で硬質のリライナーに変化!

付属のシリンジで、床の形が直せます。

標準価格: ¥27,800 (粉 80g、液 60mL、ニューソフトコート30mL)



● **ハードバイト** (光重合型咬合面再構築用レジン) PAT.

承認番号 21000BZZ00544A01 (管理) 一般的名称: 義歯床補修用レジン

レジン歯(硬質含む)咬合面の再構築や、歯周補綴やインプラントの上部構造など、耐久性が求められるプロビジョナルなレストレーションに適しています。塗るだけでツヤのでる表面滑沢材つき。

標準価格: ¥13,300(粉80g、液60mL、表面滑沢材10mL)



● **リプロクリーン** (漂白用の超音波洗浄専用の義歯洗浄剤)

わずか5分~10分間の超音波洗浄で、タバコのヤニなどの頑固な汚れの漂白と除菌が同時にできる、歯科医院専用の義歯洗浄剤です。(水で2倍に希釈して使用)

義歯修理時の患者サービスに適しています。

標準価格: ¥4,700/1.2 L

標準価格: ¥13,100/4 L



● **リプロメルト** (超音波洗浄専用の義歯洗浄剤)

歯石が頑固に付着した義歯の洗浄に! (希釈せず原液で使用)

1.わずか5~10分の超音波洗浄で、歯石がとれる。

2.ヌメリをとり、除菌にもなります。

3.クラスプやレジン床を痛めません。

標準価格: ¥4,300/1.8 L



REPRO LINER

After taking the functional impression, Repro liner begins curing automatically.

Powder

Liquid

Measuring Cup

Mixing Cup

Spatula & Spuit

動的リライナー

リプロライナー

ティッシュコンディショナーの機能がある
動的機能リライナー

はじめ軟らかく、装着より約1週間後、

機能印象が採れた頃から硬化が始まります。

REPRO LINER

*仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格は2023年12月現在。消費税は含まれておりません。

●取扱歯科商品店

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは
株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター
0800-170-5541
※対応時間 / 月~金 9:00~17:30 土 9:00~17:00
(日曜・祝祭日を除く)

製造販売元
亀水化学工業株式会社
〒572-0071 大阪府寝屋川市豊里町17-16



(01)02747937009338
C01387/2023年12月/PRI/2/@40/改

REPRO LINER

After taking the functional impression, Repro liner begins curing automatically.


Powder
Liquid
Measuring Cup
Mixing Cup
Spatula & Spuit

- はじめはティッシュコンディショナーとしての機能があり、約一週間後、その機能印象面が徐々に硬質リライン面に変化し始めます。

夜間就寝時取り外している場合は、一週間程度で硬化が始まります。常時装着している場合は、3～5日で硬化が始まります。

リプロライナーの硬さの経時変化

※製造販売元による実験結果

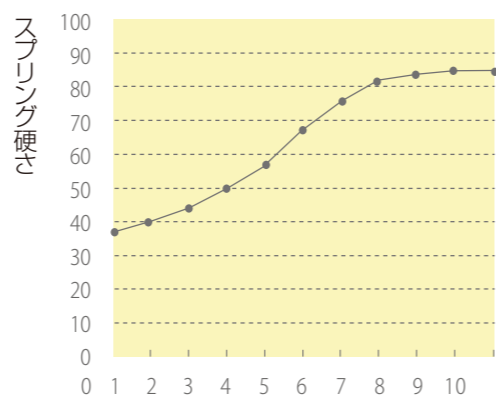

37°C水中浸漬日数 (常時浸漬)

グラフは常時37°Cに浸漬した場合の硬化曲線です。3～5日後に硬化が始まっております。

- リライン材の厚みを変えることによって、軟らか感が変わります。

アフターや骨隆起部など一時的に緩衝したい部位は、該当する床内面を多めに削除 (裏装材の厚みが2mm程度以上) することによって、軟らか感が比較的長く続きます。

- はじめは軟質で、義歯に慣れやすい。

軟質の期間が1週間前後あり、この間に機能時の印象がとれますので、痛みも少なく義歯に慣れやすくなります。



認証番号 219AFBZX00118A01 (管理医療機器) / 義歯床補修用レジン

[セット内容] 粉 50g、液 45mL、ニューソフトコート 30mL
粉計量カップ、3mL用スポイト、ラバーカップ、スパチュラ
病院価格：20,400円 (税別)



1

咬合調整と床の削除

床粘膜面と床縁を一層削除し、新生面を出します。アフターや骨隆起部など一時的に緩衝したい部位は、該当する床内面を多めに削除することによって、軟らか感が比較的長く続きます。



2

接着用に“ニューソフトコート”を塗布

接着用として付属の“ニューソフトコート”を新生面に塗布します。



3

計量・混和

標準粉液比は粉計量カップ目盛3に対して、液2.5mLです。



4

レジンの盛り上げと口腔内挿入

混和物が床から垂れなくなってから盛り上げます。(室温23°Cで混和後1～2分) 口腔内保持時間は約4～5分です。



5

表面滑沢材“ニューソフトコート”の塗布

口腔外に取り出し、余剰部分を切り取ってから“ニューソフトコート”をリライン全面に塗布します。



6

自発的な硬化の開始

夜間就寝中は義歯を取り外した場合で、1週間前後経ってから硬化が始まります。当初は表面にやや爪のたつ程度まで硬化が進み、長期的には即重レジン並みに硬くなります。 ※床の辺縁は、中央部より硬化が遅くなります。



義歯洗浄剤に関する注意

リライン当日から硬化の始まる1週間は軟質のため、一般市販の義歯洗浄剤を使用しますと、内部に気泡を発生させ面荒れの原因となります。そのためリライン義歯の洗浄は、最初の1週間は極細毛歯ブラシ併用による水洗いのみにしてください。

1週間経過後は市販品では“酵素入りポリドント”(アース製薬)のみ使用できるようになりますが、“酵素入りポリドント”以外の“ポリドント”や、他の市販義歯洗浄剤は使用できません。