

ロングセラー  
商品

国産 歯科用不織布ガーゼ

DENTAL GAUZE

# デンタルガーゼ

吸収力

約 **2** 倍

(綿ガーゼと比較)


摩擦

ダメージが  
少ない

抜歯や  
外科処置の  
止血に

毛羽たち  
脱落繊維  
が少ない

リーマー等  
器具の  
拭き取りに

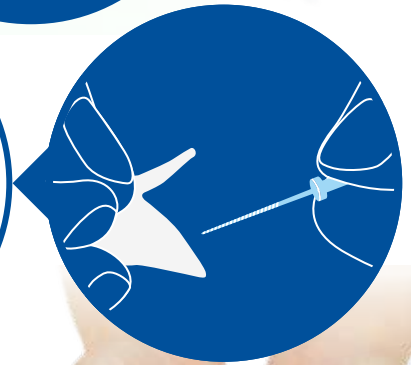

## 旭化成(株)の不織布ベンリーゼ®使用

ベンリーゼ®とは・・・?

コットンリッター※を原料とする再生セルロース(キュプラ)長繊維不織布ベンリーゼ®の優れた特長により、歯科治療を支え続けてきたヨシダのロングセラー商品です。

※綿花の種子を含むうぶ毛状の短繊維



ベンリーゼ®



高い吸水力

綿ガーゼの約2倍の吸収力なので、少ない枚数でも水分を素早く吸収し、保持します。抜歯やインプラントなど外科処置の止血用としてお使いいただけます。

吸液性比較試験

傾けた台に置いた布に着色した生理食塩水を注入して吸液性能を比較。(傾斜角度:45度 注入量:8mL 注入速度:8mL/5秒)

コットン不織布素材

レーヨン/PET不織布素材

綿ガーゼ素材




## 摩擦ダメージ軽減

繊維断面は太さにムラがなく、表面もなめらかでより真円に近い繊維構造となっています。そのため、摩擦が少なく、擦れ合った時のダメージが抑えられます。

### 疑似皮膚摩擦後の比較

皮膚の弾性に類似した疑似皮膚を異なる不織布で擦った場合に、表面にできたキズを比較。

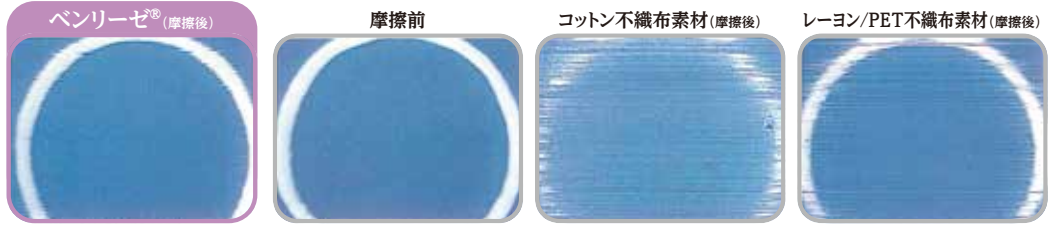


## 少ない脱落繊維

連続長繊維不織布なので、マイクロリントの発生が極めて少なく、端面、表面からの糸屑の脱落・剥離も少なくなっています。

### 毛羽立ち・脱落繊維の比較


#### 剥離後の毛羽残り

セロハンテープをサンプル表面に貼り付けてはぎ取り、テープに付着した糸屑を比較。

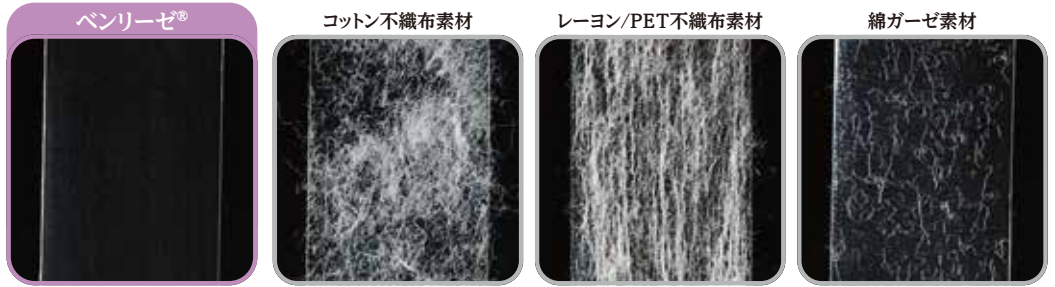

#### 摩擦後の毛羽立ち

試験機により20回摩擦した繊維表面の毛羽立ちを比較。

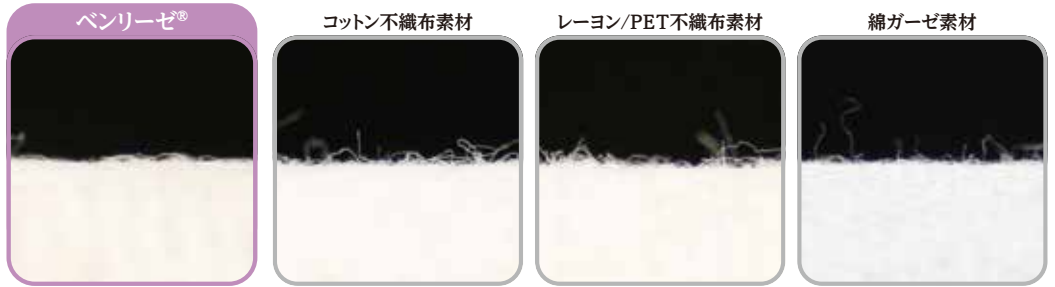

出典:旭化成(株)。試験は全て旭化成(株)で実施しております。ベンリーゼ®は旭化成(株)の登録商標です。承認番号:F52H203

## ラインナップ

### デンタルガーゼ

5×5cmで二連綿花容器にスポッリ入る便利サイズ。青箱(滅菌済)と赤箱(未滅菌)の2種類をご用意しました。

サイズ: 15×10cm(6折)  
1箱: 100枚入×6包

すぐに使える  
滅菌済



### デンタルガーゼ 4×4 (未滅菌)

リーマー等器具の拭き取りに、4×4cmで操作性がよく、経済的です。

サイズ: 4×4cm 1箱: 1,920枚



### 不織布ロールガーゼ 10mタイプ

デンタルガーゼと同じ素材の不織布ガーゼです。用途に応じてお好みのサイズに切ってご使用ください。

サイズ: 幅30cm×長さ10m



商品コード	品名	標準価格
737061	デンタルガーゼ(滅菌済)<青箱>	3,000円
737047	デンタルガーゼ(未滅菌)<赤箱>	2,400円

商品コード	品名	標準価格
423694	デンタルガーゼ 4×4(未滅菌)<白箱>	1,500円
396432	不織布ロールガーゼ 10mタイプ	600円

◎販売名:デンタル・ガーゼ EOG 滅菌済 ◎一般的名称:医療用不織布 ◎届出番号:13B2X10098000002(一般) ◎製造販売元:小津産業(株) 東京都中央区日本橋本町3-6-2  
◎販売名:デンタル・ガーゼ ◎一般的名称:医療用不織布 ◎届出番号:13B2X10098000001(一般) ◎製造販売元:小津産業(株) 東京都中央区日本橋本町3-6-2

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2023年7月現在の税別価格です。

禁無断転載

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月~金 9:00~17:30 ± 9:00~17:00  
(日曜・祝祭日を除く)

●発売元: **株式会社 ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9

●取扱店



(01)02747937016824

C02115/2023年7月/PRI/5/@20/改