

YOSHIDA

ハンドピース用小型滅菌器

FRESH CLAVE

【フレッシュクレーブ】

大容量

ハンドピース最大12本を
同時に滅菌可能。
※未包装の場合

滅菌時間
最短

4分※

※滅菌温度134℃
中実で未包装の場合
加熱、送風工程を除く

簡単、
安全性、
コンパクト

簡単

音声ガイダンスで
簡単操作

安全性

電動ロック機構による
安全機構



実際の製品正面には、使用上の安全に関する
注意書きシールを貼付しています。

FRESH CLAVE

ハンドピース滅菌に特化した設計で
先生やスタッフ、患者さんを院内感染リスクからお守りします。

電動ロック機構の安全設計

ドアはワンプッシュで開閉でき、電動ロック機構により、ロックが掛からないと作動しません。二重の安全機構で、電動ロックを検知する安全設計。

音声ガイダンスで簡単操作

用途に合わせてモードを選択し、スタートボタンを押すだけの簡単操作。



モード	滅菌温度	滅菌時間	被滅菌物
1	134℃	4分	中実で未包装の医療器材
2	134℃	15分	内空がある医療器材 または滅菌パック(一重包装)を使用する場合
3	121℃	20分	中実で未包装の医療器材
4	121℃	30分	内空がある医療器材 または滅菌パック(一重包装)を使用する場合



ハンドピース滅菌に特化した設計

ハンドピースへ蒸気を浸透させるため、空気抜き工程で陽圧を与え内部の空気を押し出します。中実で未包装なら滅菌時間は4分※、一重包装のハンドピースなら、滅菌時間は15分です。
※送風工程終了まで含むと40分

設置場所を問わずに使用可能

配管等の工事を必要とせず、100Vの医用電源があればどこでもすぐに使用ができます。
(100Vアース付コンセント定格電流15A以上単独使用)
※設置方法は取扱説明書を参照してください。



コンパクトなのに大容量

未包装のハンドピースなら同時に12本まで収容可能。滅菌パックに入れた状態のものは8本まで収容できます。



フレッシュクレープで効率的な滅菌システム

流水下洗浄

滅菌する医療器材の取扱説明書をご参照いただき洗浄してください。

注油

フレッシュケア+ならタービンをわずか30秒で注油ができます。

滅菌

約50分(2:134℃15分モード)で滅菌送風の全工程は終了します。

保存

インストルメントは安心して使用できる状態になりました。

※滅菌する医療器材、ご使用になる機器類及び滅菌パックなどの取扱説明書を良くお読みになり正しくお使いください。

フレッシュクレープ

販売名: フレッシュクレープ
 一般名称: 小型未包装品用高圧蒸気滅菌器
 認証番号: 230AFBZX00021000(管理 特管)
 製造販売元: (株)東邦技研 埼玉県越谷市大字大林657

●仕様
 本体寸法: W230×D350×H360mm
 チャンバー内寸法: φ125×H190mm
 本体重量: 約14Kg
 電源: AC100V(50/60Hz)、600W
 漏電・過負荷・短絡保護機能付きブレーカー搭載
 標準価格: ¥429,900

- 付属品
 - 専用網かご
 - エアフィルター
 - 専用網かご用取手
 - チャンバー内フィルター
 - 注水カップ
 - 専用すのこ
- 関連製品
 - 蒸留水 DC スピードソル 4L

禁無断転載

取扱店名

※当カタログに掲載の商品仕様および価格は、改良等により予告なく変更する場合があります。また、掲載商品の色調は実際の商品の色と異なる場合があります。

◎発売元: 株式会社 **ヨシダ**
 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9
<https://www.yoshida-dental.co.jp>

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは
 株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月～金 9:00～19:00 土 9:00～17:00
 (日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937016466

C02079/2022年4月/PRI/50/@20/改