
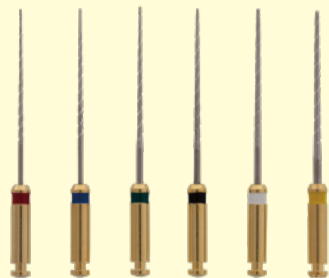


ガッタパーチャリムーバー デントクラフトGPX

らせん状のベント(溝)がついた独自の構造で、摩擦熱を発生させることでガッタパーチャを軟化させ、根管内から除去します。刃がついていないため、根管壁を傷つけない設計です。

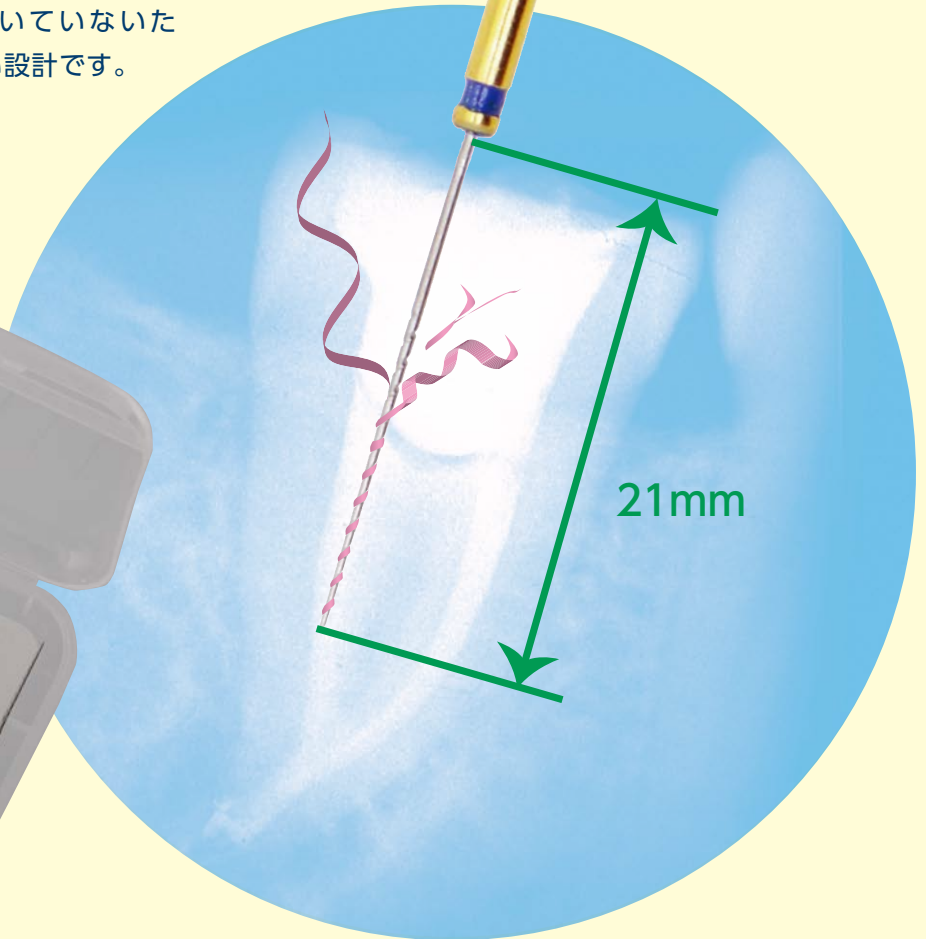

#25 #30 #35 #40 #45 #50

長さ：21mm

アソート（#25-#50 6本入）

標準価格：4,800円（1プレート6本入）

デントクラフトGPX使用法

- ① 根管より細めのGPXをご使用ください。
- ② コントラハンドピースの回転数は
3,000～5,000r.p.m.でご使用ください。
- ③ 注水、エア、バキュームは使用しないでください。
- ④ 無理に押し込まず、常にアンダーを心がけてご使用ください。
- ⑤ GPX使用後は手用器具を使用してください。

販売名：デントクラフト GPX 一般的名称：電動式歯科用螺旋状除去器
認証番号：230ALBZX00013000（管理）
製造販売元：（株）ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9

取扱店

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0120-178-148

※対応時間 / 月～金 9:00～19:00 土 9:00～17:00
（日曜・祝祭日を除く）

