

アイコンQ&A

Q1 1パックで何歯分使用できますか？

アイコン歯面用ミニキットは1パックで約4～8歯分です。

Q5 使用できる光重合器は？

波長400～500nm、光強度800mW/cm²以上の光重合器であれば使用できます。

Q2 他のエッチング材を使用できますか？

いいえ。必ず専用のアイコン・エッチをご使用ください。

Q6 ラバーダムは必要ですか？

ラバーダムでの防湿を推奨します。



Q3 アイコン・インフィルトラントを2回塗布する理由は？

アイコン・インフィルトラントは光重合により多少収縮しますので組織に充分浸潤させるために2回の塗布が必要です。

Q7 フッ素除放性がありますか？

フッ素除放性はありません。

Q4 咬合面には使用できますか？

使用できません。咬合面は平滑面ではないので、アイコン・インフィルトラントが十分に浸潤せず、効果が期待できないためです。

Q8 ホワイトニングとの併用は可能ですか？

可能です。
ホワイトニングと併用される場合は、アイコン治療前に行っていただくことをお勧めしています。アイコン治療後に行われる場合、ホワイトニングの効果が出にくいケースがございます。



Resin Infiltration
歯面コーティング材

Icon

アイコン



販売名:アイコン 一般的名称:歯面コーティング材 認証番号:224AKBZX00113000(管理)

医薬用外劇物

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2025年11月現在の税別価格です。

●お問い合わせは下記まで

製造販売元  株式会社 **ヨシダ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9
TEL:0800-170-5541(コンタクトセンター)
<https://www.yoshida-dental.co.jp/>

製造元:DMG社
DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH (ドイツ)

無断転載禁止




(01)02747937012550


C01706/2025年11月/④40/改

その部位、削りますか？

低粘度の光重合型レジン「アイコン」が、
エナメル質における初期脱灰部（ホワイトスポット）に
浸潤し、ミネラルの溶出を防止。

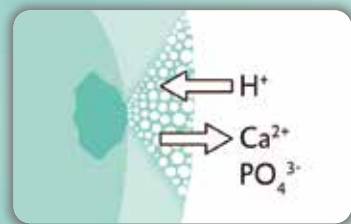

酸によるエナメル質の脱灰

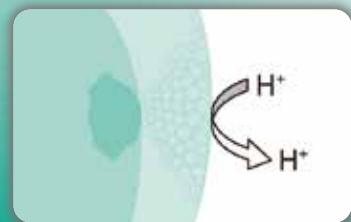

アイコンによるエナメル質の補強で酸をブロック



アイコン 歯面用 ミニキット(2セット入)

アイコン・スムーズサーフィス（歯面用）

- セット構成
スムーズサーフィスアプリケーションチップ（歯面用）×6
エッチシリンジ 0.45mL×1 医薬用外創傷
ドライシリンジ 0.45mL×1
インフィルトランドシリンジ 0.45mL×1
ルアーロックチップ×1
- 標準価格：38,000円（税別）



アイコン 隣接面用 ミニキット(2セット入)

アイコン・プロキシマル（隣接面用）

- セット構成
プロキシマルアプリケーションチップ（隣接面用）×6
エッチシリンジ 0.3mL×1 医薬用外創傷
ドライシリンジ 0.45mL×1
インフィルトランドシリンジ 0.45mL×1
ルアーロックチップ×1
歯間用ウェッジ×4
- 標準価格：38,000円（税別）




アイコンエッチ単品

- セット構成
アイコン・エッチシリンジ 0.45mL×3 医薬用外創傷
スムーズサーフィスアプリケーションチップ（歯面用）×15
- 標準価格：23,700円（税別）

使用方法




1 ホワイトスポットを確認する。

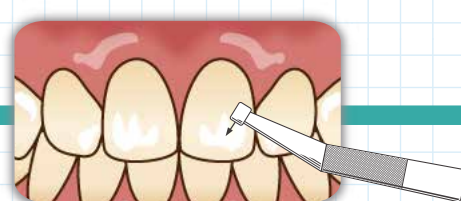


2 処置する部位を清掃し、ラバーダムを装着する。


※アイコン・インフィルトランド（低粘性レジン）をより浸潤させるための前処理として、アイコン・エッチを適用する前に、石灰化した表面層を取り除く必要がある。そのために、エッチング前にホワイトスポット（白斑）に対して最終仕上げ（研磨）用のディスク等を用いた研削を行うこと。

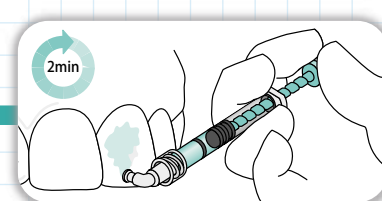

3 アイコン・エッチを処置面に適量塗布し、2分間放置する。

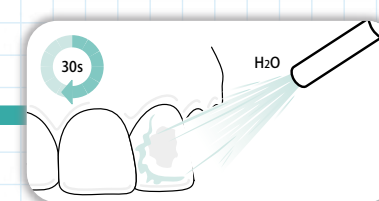


4 30秒以上水洗し、エアーで乾燥させる。

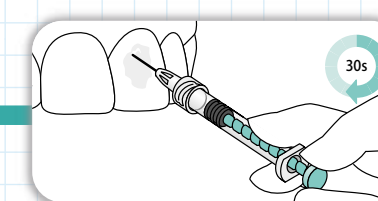

5 アイコン・ドライを処置部位に塗布し、30秒間放置し乾燥させる。




※③～⑤の工程を最大3回繰り返す。

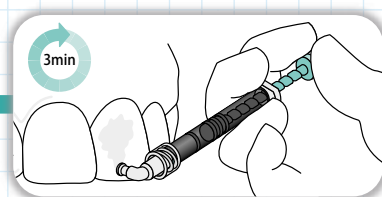

6 アイコン・インフィルトランドに新しいチップを取り付け処置部位に適量塗布し、3～6分間放置する。アイコン・インフィルトランドが浸潤する。



7 光重合器で40秒以上照射し、硬化させる。

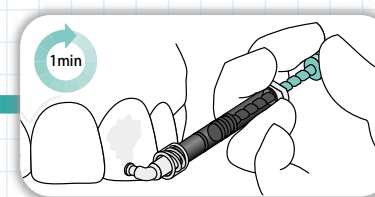

8 アイコン・インフィルトランドを処置部位に適量塗布し、1分間放置する。さらにアイコン・インフィルトランドが浸潤する。



9 光重合器で40秒以上照射し、硬化させる。



10 ラバーダムを外し、治療が完了した状態。