

# エアー除菌フィルターセット

エアーコンプレッサーから供給される圧縮空気中に含まれる塵埃・水分・油水分・臭気・菌・微粒子を2種類のフィルターで捕捉しクリーンなエアーをユニットに供給します。

## 除菌フィルター LRV $\geq$ 8<sup>®</sup>

除菌フィルターは「除菌性能 LRV $\geq$ 8」

これは、一次側に10<sup>8</sup> (100,000,000)個の指標菌を流して、二次側に漏洩する菌が1個以下であることを示しています。

※評価指標菌は、シュードモナスデミヌータ。



ろ過前  
1億個の菌



マイクロミストフィルター 除菌フィルター



ろ過後  
1個以下の菌



※エアドライヤの出力側に取り付けてください。  
(エアドライヤの代用としては使用できません。)

### 仕様

適用コンプレッサー	2.2kW 以下
処理空気量	350L/min
最高使用圧力	1.0MPa
マイクロミストフィルター	塵埃・油水分を除去
ろ過特性	0.01 $\mu$ m
除菌フィルター	菌・微粒子を除去
除菌性能	LRV $\geq$ 8 <sup>*1</sup>
抗菌活性値 <sup>*2</sup>	黄色ブドウ球菌 $\geq$ 5.2 大腸菌 $\geq$ 3.8

※1 評価指標菌は、シュードモナスデミヌータ。

2015年4月一般財団法人 北里環境科学センターにて実証済

※2 JISでは抗菌活性値が2.0以上を抗菌効果があると判断しています。

### フィルターエレメント交換時期

使用期間が1年、または6,000時間のいずれか早い方

エアー除菌フィルターセット 標準価格:70,000円

マイクロミストフィルター交換用エレメント 標準価格:7,700円

エアー除菌フィルター交換用エレメント 標準価格:18,000円


### 設置例



エアーコンプレッサー



エアドライヤー

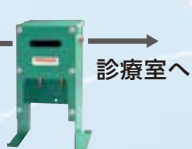

エアー除菌フィルターセット

診療室へ

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0120-178-148**

※対応時間 / 月~金 9:00~19:00 土 9:00~17:00

(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937018217

C02252/2020年9月/20/@10/PRI/新