

スピットンクリーナー SPITTOON CLEANER

FOR DENTAL CLINIC

歯科医院
専用

スピットン、 排水パイプの衛生洗浄剤

商品特長

過炭酸粒子が連続発泡（酸素）。
スピットン、排水パイプ内に沈着した有機物汚れ（血液・唾液等）の
分解洗浄・除菌・消臭に作用を發揮します。

ミントの香りが残り、洗口時に不快感を与えません。

計量しやすい目盛つきキャップで使いやすく、経済的です。



(440g)

診療終了後の使用で、朝から爽快!

過炭酸粒子の働きで、
 スピットン、排水パイプ内に沈着した
 有機物汚れ(血液・唾液等)を分解洗浄し、
 悪臭の発生を防ぐ、
 歯科医院専用のパイプ・クリーナーです。

用途 スピットン、洗面台の洗浄と除菌


本品適量 3~4g
 ブラシまたはスポンジ



適量を振りかけ、スポンジまたはブラシでよくこすり、その後充分に水で流してください。(清掃時にはゴム製などの手袋をご使用ください)

用途 スピットンの排水口排水パイプの洗浄と除臭

本品 25g (キャップ目盛線▼20)
 水またはお湯 (約200ml)

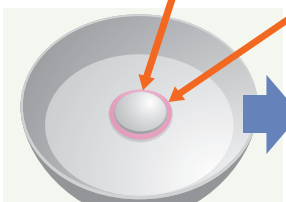

翌朝、充分に水で洗い流してください。

本品を入れた後、水またはお湯をスピットンの排水口へ注ぎ、そのまま翌朝まで放置します。

●いずれも、40℃程度のお湯をお使いになると、いっそう効果的です。 ●汚れがひどい場合は、適宜増量してお使いください。

キャップの使い方



25g (▼20の目盛線で25g計量できます。)

! 本製品は、スピットン専用の洗浄剤です。
 バキューム・排唾には使用しないでください。
 注意 ユニット故障の原因となります。

※本品は粒状のため、輸送時の振動等で容器内に空間ができます。正味量は表示どおりです。



スピットンクリーナー

スピットン、排水パイプの衛生洗

品名	目付 梱内容	寸法(mm)／重量(kg) (高さ×幅×奥行)	JANコード
スピットンクリーナー	440g 12本	個：228.6×68.6×68.6mm 497g 梱：242×282×214mm 6.2kg	4 901301 340337

※商品写真以外の画像に関して、他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁じます。 ※スピットンクリーナーは花王の商標です。

●お問い合わせは下記まで

●発売元：株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 ☎0800(170)5541(コンタクトセンター フリーコール) <http://www.yoshida-dental.co.jp>

●販売元：花王プロフェッショナル・サービス株式会社 **kaoy** 〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3 ☎03(5630)9283



(01)02747937015216

C01952/2022年6月/花王/@20/改