

YOSHIDA

医療現場における、さらなる安心

Hydro Ag+

ハイドロ エージープラス

持続除菌

アルコールスプレー・クロス



Hydro Ag+ クロス(アルコール80%)大判タイプ
品名 アルコールクロス
成分 エタノール(70wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、緩衝剤
内容量 140mm×250mm×300枚
発売元 富士フイルム株式会社 東京都港区赤坂2-29-30

【製品特徴】アルコール濃度により持続性をプラスした持続除菌(0.5%アルコール)のHydro Ag+技術をより一層組み合わせたFUJIFILM独自の持続除菌クロスを開発しました。持続除菌効果が長時間持続します。アルコール濃度は消毒効果の向上に寄与しますが、過度なアルコール濃度は皮膚乾燥や目刺激の原因となります。また、過度なアルコール濃度は可燃性が高くなるため、取り扱いには注意が必要です。

【用途】手がよく触れる場所の除菌・消毒(ドアノブ、スイッチ、手すり、手洗い台、トイレ、洗面台、シンク、スリッパ、手すり、手すり)

【使用方法】①容器の蓋を外し、内容物をよく攪拌し、容器の中心からローラーの中心から一方向にクロスを引き出し、容器の蓋を閉じて保管する。②中キャップを取り出し、容器の蓋から一枚目のクロスを取り出す。③クロスを取り出し、容器の蓋を閉じて保管する。

【使用上の注意】
①火気厳禁
②火災のそばで使用しないでください。目に入った場合は直ちに水で洗い流し、症状が重なる場合は医師の診察を受けてください。
③アルコール濃度や成分の異なる製品と併用する場合は、必ずアルコール濃度や成分の異なる製品と併用しないようにしてください。
④本品は可燃性です。火気厳禁の場所や可燃物のそばで使用しないでください。
⑤本品は可燃性です。火気厳禁の場所や可燃物のそばで使用しないでください。
⑥本品は可燃性です。火気厳禁の場所や可燃物のそばで使用しないでください。

Hydro Ag+ クロスは、アルコール濃度80%のアルコールを含有していますが、アルコール濃度は消毒効果の向上に寄与しますが、過度なアルコール濃度は皮膚乾燥や目刺激の原因となります。また、過度なアルコール濃度は可燃性が高くなるため、取り扱いには注意が必要です。

【使用上の注意】火気、高温、可燃物のそばで使用しないでください。火災のそばで使用しないでください。目に入った場合は直ちに水で洗い流し、症状が重なる場合は医師の診察を受けてください。

危険 火気厳禁
可燃性液体
腐食性
刺激性
有害
環境に有害
GHS02
GHS05
GHS07
GHS09
GHS11
GHS12
GHS13
GHS14
GHS15
GHS16
GHS17
GHS18
GHS19
GHS20
GHS21
GHS22
GHS23
GHS24
GHS25
GHS26
GHS27
GHS28
GHS29
GHS30
GHS31
GHS32
GHS33
GHS34
GHS35
GHS36
GHS37
GHS38
GHS39
GHS40
GHS41
GHS42
GHS43
GHS44
GHS45
GHS46
GHS47
GHS48
GHS49
GHS50
GHS51
GHS52
GHS53
GHS54
GHS55
GHS56
GHS57
GHS58
GHS59
GHS60
GHS61
GHS62
GHS63
GHS64
GHS65
GHS66
GHS67
GHS68
GHS69
GHS70
GHS71
GHS72
GHS73
GHS74
GHS75
GHS76
GHS77
GHS78
GHS79
GHS80
GHS81
GHS82
GHS83
GHS84
GHS85
GHS86
GHS87
GHS88
GHS89
GHS90
GHS91
GHS92
GHS93
GHS94
GHS95
GHS96
GHS97
GHS98
GHS99
GHS100

TEL 050-3786-1711

独自技術による “持続力”ある環境除菌で 院内感染のリスクを軽減


Hydro Ag+は、アルコールによる除菌効果に加えて、銀系抗菌剤と超親水コートによる“持続除菌”を兼ね備え、院内環境を感染のリスクから守り続けます。




長時間にわたり除菌性能を発揮

銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせたHydro Ag+技術によって、アルコールが蒸発した後も持続的に微生物の増殖を抑制します。

従来のアルコールクロスの場合

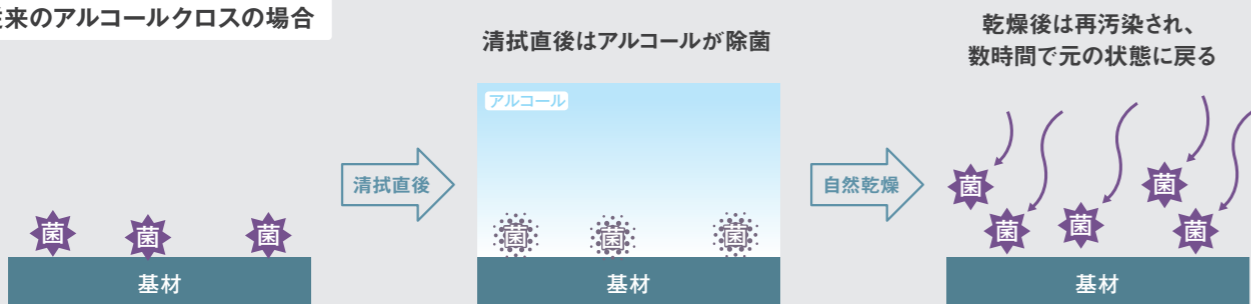


Hydro Ag+ の場合

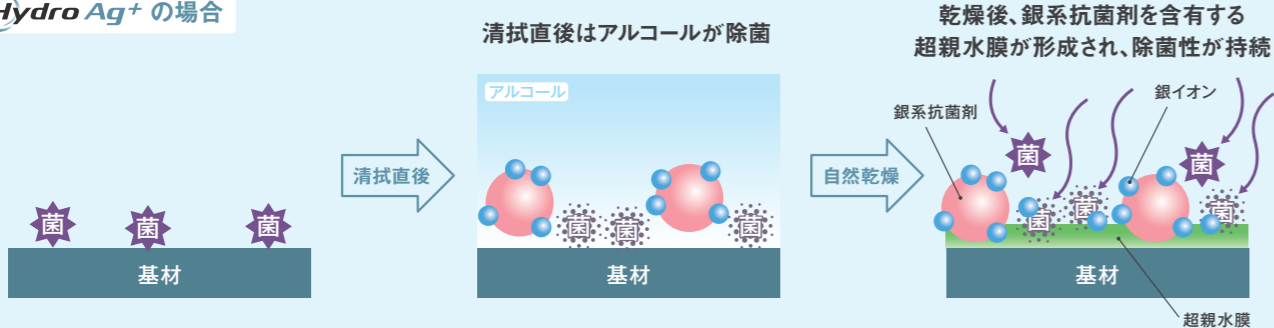

従来にない「持続除菌」性能

従来のアルコール同等の除菌性能を発揮。さらに銀系抗菌剤と超親水ポリマーによる“持続除菌”も従来品を大きく超える効果が見込めます。

従来品同等の除菌性能に銀の持続性をプラス

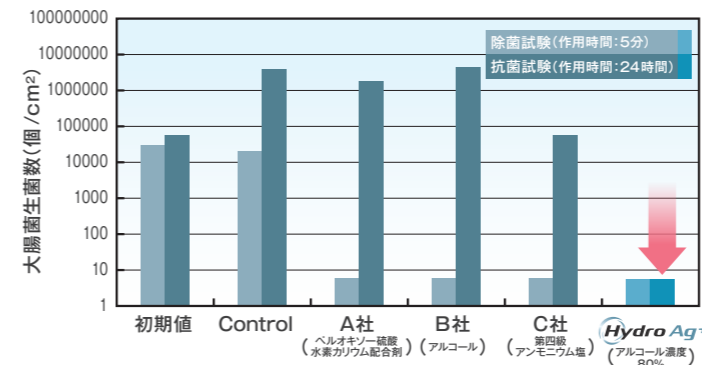


除菌試験:住宅用合成洗剤、及び石けん除菌活性試験準拠
抗菌試験:JISZ2801抗菌性試験準拠



継続使用で持続除菌効果をさらにアップ

同一箇所に対して繰り返し用いることで、より強固なHydro Ag+コート膜が形成され、効果を高めることができます。

Hydro Ag+ 塗り重ね効果 (アルコール濃度80%)

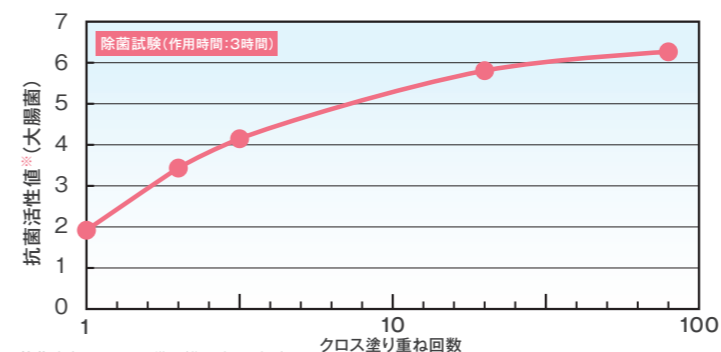

抗菌試験:JISZ2801準用(作用時間3時間)
※「抗菌活性値」とは微生物が何桁減少したかを示します

人にやさしく安心

経口毒性	GHS区分は「区分外」 (LD50>2,000mg/kg)
皮膚刺激性	GHS区分は「区分外」 (無刺激)
皮膚感作性	LLNA:BrdU-ELISA法 陰性
生殖細胞変異原性	Ames試験 陰性
発がん性	IARCランク1, 2A, 2B 該当物質なし

院内のさまざまな箇所にお使いいただけます。

- 院内のあらゆる手に触れる環境表面に使用可能。患者様はもちろん、来院者や医療従事者の感染リスクを抑えます。
※皮製品、樹脂塗装、樹脂製品等、素材によっては変色、変質、溶解する場合がありますので、目立たない部分で確認してから使用してください。
- クロスタ입とスプレータイプの使い分けにより、対象物の設置場所や素材、形状などの違いに柔軟に対応します。



内容量

[アルコールクロス] 140mm×250mm×300枚
[アルコールスプレー] 480mL

成分

エタノール、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤

用途

手がよく触れる環境表面の除菌・抗菌(ドア、机、車いす、スイッチ類、手すり等)
布製品※(カーテン、布張りソファ、カーペット等)※アルコールスプレー

保管上の注意

火気、火花、高温、直射日光は避け、小児の手の届かない所に保管してください。アルコールクロスは、乾燥を防ぐため使用後は蓋をしっかりと閉め、開封後はできるだけ早く使い切ってください。

使用上の注意

火気のそばで使用しないでください。目に入った場合は直ちに水で洗い流し、症状が重い場合は医師の診察を受けてください。アルコール過敏症や皮膚の弱い方が使用された場合には、肌荒れ等にご注意ください。必要に応じて、手袋、マスク、保護メガネ等を着用してください。蒸気、ミストを吸入しないようにしてください。アルコール含有のため、皮製品・樹脂塗装・樹脂製品等、素材によっては変色・変質・溶解する場合がありますので、目立たない部分で確認してから使用してください。レンズ等へは使用しないでください、コーティングがはがれるおそれがあります。クロスは水に溶けないため、トイレには流さないでください。人体や食品・食器には使用しないでください。用途以外には使用しないでください。クロスは本製品の詰替用クロスをご使用ください。



火気注意



眼付着注意



変色注意



手や顔を拭くこと禁止



レンズ清拭禁止



便器投棄禁止




食品・食器に使用禁止




口に入れるものには使用禁止

使用方法

アルコールクロス

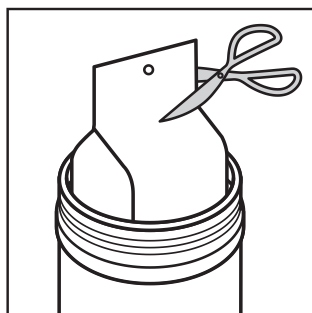

1 容器の蓋を外し、内袋をボトルに入れて開封

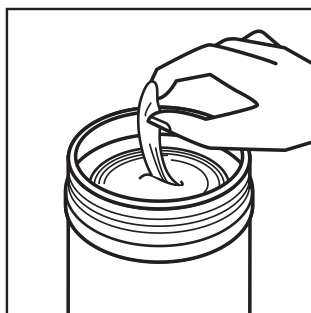

2 ロールの中央から一枚目のクロスを引き出す



3 蓋中央の取り出し口の内側から1枚目のクロスを通す



4 蓋を閉め、取り出し口から出ているクロスを引き出す

アルコールスプレー

使用前にボトルをよく振り、ノズルをONの位置にし、不織布などにスプレーして清拭、もしくは直接スプレーしてください。使用後はノズルをOFFの位置に戻してください。

製品ラインアップ

品名	製品イメージ	内容量	標準価格	商品コード	JAN
Hydro Ag+ (アルコール 80%)					
Hydro Ag+ アルコールクロス専用容器 ※クロスは含まれません		—	2,000 円 (税別)	408354	4547410371925
Hydro Ag+ アルコールクロス (アルコール 80% 300枚入り) 詰替用		140×250mm 300 枚	3,000 円 (税別)	408361	4547410371932
Hydro Ag+ アルコールスプレー		480mL	2,480 円 (税別)	408856	4547410347401

製造販売業者

富士フィルム株式会社

〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目26番30号 富士フィルム西麻布ビル
TEL: 050-3786-1711(富士フィルムお客様コミュニケーションセンター)
Mail: hydro_ag@fujifilm.com

販売業者: 株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせ

TEL.0800-170-5541

https://www.yoshida-dental.co.jp

Hydro Ag+ アルコールスプレー・クロス Printed in Japan 2018.3 FFBX

C02273/2021年4月/30/PRI@40/改



(01)02747937018422