



プレジジョン Fast Pack

セット内容：プレジジョン Fast Pack 本体・充電ベース・チップ（3 種）・アダプター（充電器）
標準価格 130,000 円

プレジジョン Fast Pack チップアソート 3 本入 標準価格 16,800 円
プレジジョン Fast Pack チップ各サイズ 1 本入 標準価格 7,700 円

一般の名称：電熱式根管プラグ 認証番号：302AGBZX00074000（管理 特管）
製造販売業者：Angelus Japan 株式会社



プレジジョン Fast Fill

セット内容：プレジジョン Fast Fill 本体・充電ベース・専用チップ（23G・25G）・マルチツール・アダプター（充電器）
標準価格 148,000 円

プレジジョン Fast Fill チップ 23G・25G 各 1 本
標準価格 12,300 円

一般の名称：歯科根管材料電気加熱注入器 認証番号：302AGBZX00075000（管理）
製造販売業者：Angelus Japan 株式会社

■関連商品



RE バイオガッタパーチャベレット

セット内容：100 本
標準価格 3,500 円

一般の名称：歯科用根管充填固状材料
認証番号：302ALBZX00015000（管理）
製造販売元：株式会社ヨシダ



RE バイオガッタパーチャポイント

02 テーパー（#15 ～ #80、アソート）120 本入
04 テーパー（#15 ～ #50、アソート）60 本入
06 テーパー（#15 ～ #50、アソート）60 本入
標準価格 各 2,200 円

VT（#F1 ～ #F5、アソート）60 本入
ONE（#S ～ #L、アソート）60 本入
REC（#R25 ～ #R50、アソート）60 本入
標準価格 各 2,500 円

アクセサリーポイント（#S ～ #L）120 本入
標準価格 各 2,200 円

一般の名称：歯科用根管充填ガッタパーチャポイント
認証番号：302ALBZX00007000（管理）
製造販売元：株式会社ヨシダ



バイオ シー シーラー（Bio-C Sealer）

セット内容：バイオ シー シーラー 0.5g × 4 本
エンドチップ S × 20 本
標準価格 14,000 円

一般の名称：水酸化カルシウム系歯科根管充填材料
承認番号：30200BZX00263000（高度）
製造販売業者：Angelus Japan 株式会社

エンドチップ S

セット内容：20 本入
標準価格 2,000 円

一般の名称：歯科用充填・修復材補助器具
届出番号：27B1X00147000001（一般）
製造販売業者：Angelus Japan 株式会社

※ 仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は 2026 年 7 月現在。消費税は含まれておりません。

無断転載禁止

●お問い合わせは下記まで

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00
（日曜・祝祭日を除く）



(01)02747937018538

●販売元：株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野 7-6-9 <https://www.yoshida-dental.co.jp>
●製造販売業者：Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積 4-13

C02283/2026年7月/@40/改

YOSHIDA

angelus
Japan

プレジジョン

電熱式根管プラグ

Fast Pack

歯科根管材料電気加熱注入器

Fast Fill



電熱式根管プラグ
プレジジョン Fast Pack



歯科根管材料電気加熱注入器
プレジジョン Fast Fill





実寸大

プレジジョン Fast Pack



幅広い温度設定
90℃～250℃の幅広い温度設定が可能です。
5つのメモリー設定が可能
例：M1: 200℃、M2: 220℃など



クイッククーリング
冷却時間が短く、先端部 (4-6mm) のみが加熱されるため、火傷の防止に繋がります。
温度がディスプレイに表示されるため、安心して診療が行えます。



バッテリー
2,600mAh のリチウム電池
約 2 時間のフル充電で約 4 時間使用可能です。



優れたチップ
根管の大きさに応じた 3 種類のチップ (実寸大)
ガッタパーチャの切断と加圧が容易です。



スモール (Black)
φ 0.4mm/2.5% テーパー

ミディウム (Yellow)
φ 0.5mm/5% テーパー

ラージ (Blue)
φ 0.6mm/6% テーパー



シンプルな操作

メインスイッチがリング状で 360° 操作が可能のため、様々な角度からの診療が容易です。



約 2 秒のクイッククーリング

クーリングの際、常にディスプレイに温度が表示されるため安心です。

仕様

加熱時間	約 0.2 秒 で 200℃ までの上昇 約 0.5 秒 で 250℃ までの上昇
冷却時間	約 2 秒 でのクイッククーリング
充電時間	約 2 時間
操作時間	250℃ 設定の場合 約 4 時間の操作が可能 (フル充電の場合)



実寸大

プレジジョン Fast Fill



3 つのメモリーを有し以下の設定が可能です。
温度：100, 120, 140, 150, 160, 180, 200℃
スピード：Low・Mid・High



ディスプレイで加熱時の温度やガッタパーチャの残量を確認でき、安心です。



バッテリー
2,600mAh のリチウム電池
約 4 時間でフル充電が可能です。



2 種類のチップ (実寸大)



ディスプレイで簡単確認

温度やガッタパーチャの残量の確認が可能です。



シンプルな操作

ペンタイプで持ちやすく、押した際のみガッタパーチャが押し出されます。

仕様

加熱時間	約 20 秒 で 200℃ までの上昇
充電時間	約 4 時間
マルチツール専用レンチ	マルチツールで先端を曲げ、回転操作、本体の清掃が可能です。