

## 口腔内細菌カウンタ

NP-BCM01-A

# DEPIM法<sup>※</sup>を用いて 口腔内の衛生状態を

## 約1分 で簡単に検査



短時間



操作简单

※DEPIMとは

DEPIM(DiElectroPhoretic Impedance Measurement)は誘電泳動で液体中の細菌を電極に捕集させ、インピーダンスの変化を計測して検体1mL中の細菌濃度(cfu/mL)に換算し、定量的に細菌数を計測できる測定方法です。



特長 1

保険適応製品

保険点数

# 130点


※詳細は裏面記載

特長 2

## コンパクトサイズで 訪問歯科診療の場でも活躍!

機器本体寸法:  
W144mm×H147mm×D189mm

機器重量  
約1.3kg

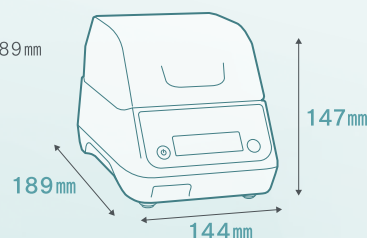

特長 3

## 検査も簡単! 特別なノウハウ不要!

測定結果は わかりやすい7段階

フェイスマーク表示と測定数値のダブル表示

フェイスマーク表示部とレベル表示						
少ない						多い
レベル 1	レベル 2	レベル 3	レベル 4	レベル 5	レベル 6	レベル 7
10万個未満	10万～ 100万個 未満	100万～ 316万個 未満	316万～ 1000万個 未満	1000万～ 3160万個 未満	3160万～ 1億個 未満	1億個以上

特長 4

## パソコンでデータ管理可能!

測定結果は **5,000件** までのデータを  
機器本体に保存します。

データ項目

- ・日時
- ・総細菌数
- ・レベル



テンキー※1



パソコン

USBケーブル  
※2


※1: テンキー(市販品)USB2.0対応 Aタイプ

※2: 2 USB接続ケーブル(市販品)USB2.0対応 Aタイプ: ミニBタイプ-5Pin



操作簡単

特別なノウハウ不要で簡単に検査、  
コンパクトサイズで  
訪問歯科診療の場でも活躍

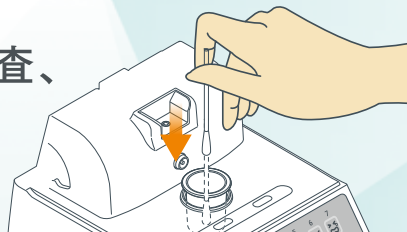

使用方法



## 保険点数の詳細

### 算定要件



- 舌の表面を擦過し採取されたもの または 舌の下部から採取された唾液を検体として、口腔細菌定量分析装置を用いて細菌数を定量的に測定することをいい、月2回に限り算定
- 1月以内に口腔細菌定量検査を算定する検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については**所定点数の100分の50に相当する点数**により算定  
※1回目 → **130点**    2回目 → **65点**    (130点の100分の50)
- 歯周病検査 または 歯周病部分的再評価検査を算定した月は、別に算定できない。

### 施設基準

- 当該診療を行うにつき、十分な経験を有する歯科医師が**1名以上配置**されていること。
- 当該保険医療機関内に**口腔細菌定量分析装置を備えていること。**

引用元：  
厚生労働省 令和4年度診療報酬改定の概要

### 対象患者

- 在宅等において療養を行っている患者
- 歯科診療特別対応加算の **イ、ロ** または **二** の状態の患者  
**イ** 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く、体幹の安定が得られない状態  
**ロ** 知的発達障害等により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態  
**二** 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に際して家族等の援助を必要とする状態

## 口腔バイオフィルム感染症の診断基準

### 1 舌下部の唾液を サンプルとして用いる場合

$3.16 \times 10^6$  CFU以上

(レベル4以上)の場合

口腔バイオフィルム感染症と診断。




10秒間  
静置

### 2 舌上部の表面から サンプルを採取する方法を用いた場合

$1.00 \times 10^7$  CFU以上

(レベル5以上)の場合

口腔バイオフィルム感染症と診断。

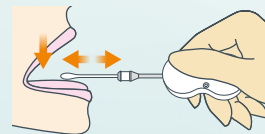

### ●口腔内細菌カウンタ (NP-BCM01-A)



標準価格：450,000円(税別)  
一般的名称：微生物定量分析装置  
承認番号：13B1X10381001003(特管)

#### 付属品

- 定圧検体採取器具 1個
- 電源コード 1個
- ACアダプター 1個

### ●専用消耗品 100回分 (N-DP05)



測定溶液入カップ  
(100個入)



センサーチップ  
(100個入)



滅菌綿棒  
(105本入)

標準価格：29,800円(税別)  
一般的名称：医科用巻綿子  
届出番号：13B1X10381001004(一般)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

価格は2022年9月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●お問い合わせ先

株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9

コンタクトセンター：0800-170-5541 <http://www.yoshida-dental.co.jp>

●製造販売業者

パナソニック株式会社

●取扱店



(01)02747937019962

C02427/2022年9月/5/PRI/@20/新