




シリコーン印象材 ハニガムプロ

マージン部を精密に再現する高い流動性

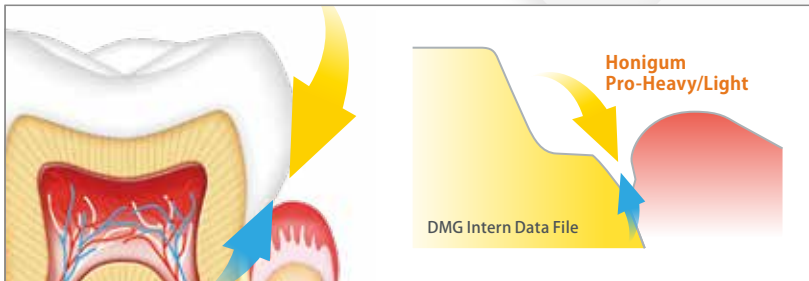

ハニガムプロライトは、高い流動性があり歯肉溝内深くまで入り込むため、印象採得で重要なマージン部の再現性が高く、より精度の高い補綴物の作製が可能です。

歯肉溝を模型で再現した実験です。赤線で示した歯肉溝の深いところまで印象材が流れているのがわかります。



口腔内からの撤去時もマージン部がちぎれにくいため、精度の高い作業模型が作れます。




2分45秒間の作業時間(通常タイプ)
※出典元: Internal DMG measurements, data on file 2011

効率の良い硬化スピード

術者、スタッフにとって作業時間に余裕があるため、印象採得が煩雑になることはありません。

また、口腔内にセットして圧をかけるとシャープに硬化するためストレスのない優しいシリコーン印象材です。

Flow on Demand

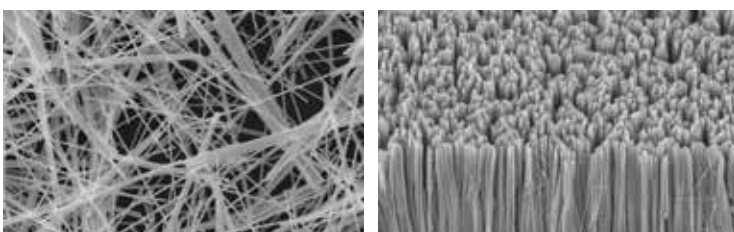

DMG社独自のマトリックス構造により、高い物性を実現



ファストタイプとは

ハニガムプロファストの操作時間は1分30秒、硬化時間が2分であり、複数回印象採得をされる先生や患者数が多く、チェアタイムが長くとれない先生におすすめです！



テクニカルデータ

Honigum Pro	Light		Mono				Heavy				Putty
		Fast	Fast		Fast		Fast		Fast		Soft
ml	50	50	380	380	50	50	380	380	50	50	450
練和時間(分)											0:30
口腔内操作時間(分)	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30					
最大口腔外操作時間(分)	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 3:15
口腔内での硬化時間(分)	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15
寸法変化[24時間後](%)	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5
圧縮永久ひずみ(%)	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
ショアA硬度	= 48	= 48	= 56	= 56	= 56	= 56	= 68	= 68	= 68	= 68	= 62
圧縮ひずみ(%)	= 4,0	= 4,0	= 2,8	= 2,8	= 2,8	= 2,8	= 1,8	= 1,8	= 2,0	= 2,0	= 2,2
色調											

商品ラインナップ



ハニガムプロ ライトボディ 50mL×2本
ハニガムプロファスト ライトボディ 50mL×2本
標準価格:各8,800円(税別)

- ・50mL×2本
- ・オートミックスチップ イエロー×10本
- ・イントラ オーラルチップ×10本



ハニガムプロ モノボディ 50mL×2本
ハニガムプロファスト モノボディ 50mL×2本
標準価格:各8,500円(税別)

- ・50mL×2本
- ・オートミックスチップグリーン×4本
- ・イントラオーラルチップ×4本



ハニガムプロ ヘビーボディ 50mL×2本
ハニガムプロファスト ヘビーボディ 50mL×2本
標準価格:各8,190円(税別)

- ・50mL×2本
- ・オートミックスチップグリーン×4本



ハニガムプロ モノボディ 380mL×1本
ハニガムプロファストモノボディ 380mL×1本
標準価格:各16,000円(税別)

- ・380mL×1本
- ・380mL用ミキシングチップ×10本



ハニガムプロ ヘビーボディ 380mL×1本
ハニガムプロファストヘビーボディ 380mL×1本
標準価格:各19,300円(税別)

- ・380mL×1本
- ・380mL用ミキシングチップ×10本



ハニガムプロ バテソフト
ベース/キャタリスト 各450mL
標準価格:21,000円(税別)

- ・ベース/キャタリスト各450mL

◎一般的名称: 歯科用シリコーン印象材 ○販売名: ハニガムプロ ○認証番号: 302AKBZX00055000(管理)

◎製造販売元 株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.0800-170-5541(ユニット・歯科材料・滅菌器その他のお問合せ)
※ 仕様は製品改良等のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 禁無断転載



(01)02747937019726

C02403/2023年10月/PRI/20/@20/改