

ヌールコート

Nu:le Coat

さらっと塗れてしっかりコーティング



Nu:le Coat

製品の詳細はこちら



低粘性でさらっと塗りやすい

Nu:leコート リキッドは塗りやすい粘性を追求しました。
低粘性設計で筆跡が残りやすく、薄く均一に塗布することができるため、歯科修復物の表面形状を損なわずコーティングやキャラクタライズが可能です。また、厚みをもたせたい場合にはジェルタイプをご使用ください。

1層の厚み

- リキッド : 5 ~ 15 μm
- ジェル : 20 ~ 50 μm



※Nu:leコート ジェルを使用する場合は、前処理としてレジン表面に必ずNu:leコート リキッドを塗布し予備重合後にNu:leコート ジェルを塗布し光重合を行ってください。

透明(クリア)を追求


高いコーティング硬度はそのまま、
黄色みの原因となる光重合開始材を極限まで減らしました。
Nu:leコート リキッド クリアーは硬化直後でも透明なため、重ね塗りしても歯科修復物本来の色調に影響しにくく、ホワイトニング対応シェードにも使いやすい設計です。



比較用試作品 クリアー
ペレット(硬化直後)厚み: 1.0mm

豊富なカラーラインアップ・シェードプラス

リキッドタイプは15色のカラーを展開。
中でも、Aプラス、Bプラス、Cプラスは塗布することで
シェードの微調整が可能です。

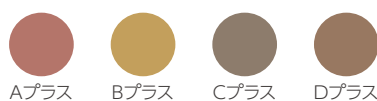

イーバ B2-GR ▶ Bプラスを1層塗布 ▶ Bプラスを2層塗布



◀ヌールコート 製品レポートはこちら
YAMAKIN社ホームページ
パンフレットにある製品レポートをご覧ください

◆ Liquid (大容量) ◆



たっぷり使える大容量サイズ

857931
Nu:leコート リキッド クリアー (30mL) 13,500円



※大容量サイズの容器は、傾けると液が出ます。採取時は容器をゆっくり傾け、採取後は速やかに蓋を閉めてください。
※本材を、ファイバーを含有しないクラウンや義歯床用レジン材料 (PMMA やポリカーボネート等) に対して厚く塗布すると、クラック等の原因になることがあります。
塗布目安を守ってご使用ください。
<単冠や義歯床> 膜厚40μm以内、目安3層まで
<ブリッジ連結部のような変形しやすい部分> 膜厚30μm以内、目安2層まで

◆ Liquid ◆



さらっと塗りやすい
コーティング・キャラクタライズに

816128
Nu:leコート リキッド クリアー (6mL) 3,000円
Nu:leコート リキッド (4mL) 全15色 各4,200円

商品番号: カラー名
816135: ホワイト 816150: グレー 816142: ブラウン
816181: イエロー 816174: オレンジ 816167: ブルー
816231: レッド 816249: ピンク 816256: ブラック
839486: ガム 839493: ダークブラウンHV
816199: Aプラス 816200: Bプラス
816217: Cプラス 816224: Dプラス

◆ Gel ◆



厚みを持たせたい部分に

816111
Nu:leコート ジェル クリアー (2mL) 4,800円

816263	Nu:leコート ジェル・リキッドセット	7,860円	(付属品: 平筆1本、丸筆 1本、ディスプレイ採取皿25枚)	357924	Nu:leコート コンプリートセット収納ボックス	4,000円
816271	Nu:leコート シェードプラスセット	17,000円	(付属品: 平筆1本、丸筆 1本、ディスプレイ採取皿25枚)	443889	ディスプレイ採取皿 50枚	2,000円
357917	Nu:leコート コンプリートセット	50,000円	(付属品: 平筆 3本、丸筆 3本、ディスプレイ採取皿50枚)			

● セット内容一覧

タイプ	ジェル	リキッド																
カラー	クリアー	クリアー	ホワイト	グレー	ブラウン	イエロー	オレンジ	ブルー	レッド	ピンク	ブラック	ガム	ダーク ブラウンHV	Aプラス	Bプラス	Cプラス	Dプラス	
ジェル・リキッドセット	●	●																
シェードプラスセット		●												●	●	●	●	
コンプリートセット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

使用手順

※本製品はレジン用です。歯質には使用できません。

● ラボサイド



● チェアサイド



写真提供: 医療法人山北歯科診療所 (高知県香南市)

※紫色LED等の出力ピーク波長が400±20nmである光照射器

光照射器をお探しの方に

angelus Japan
多彩なモードも簡単設定
ジェラル D-Lux Pen
ディラックス ペン
有効波長域が 385~515nmなので、Nu:leコートの硬化に適しています
製品の詳細はこちら

販売名: ジェラル D-Lux Pen
一般的名称: 歯科重合用光照射器 (汎用歯科用照明器)
届出番号: Z7B1X00147000012
製造販売元: Angelus Japan株式会社 大阪府茨木市下穂積4-13

※カタログ内の試験に関するデータはYAMAKIN株式会社に検証したのになります。
※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 ●価格は2026年4月現在の税別価格です。

無断転載禁止



YY ALLIANCE

株式会社ヨシダとYAMAKIN株式会社の業務提携により、
双方スピード感を持ち幅広い市場へ、
より良い製品提供に尽力してまいります。

●お問い合わせは下記まで

販売名: Nu:leコート
一般的名称: 歯科表面滑沢硬化材 (高分子系歯冠着色材料/歯科レジン用接着材料/
歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材/歯科接着・充填材料用表面硬化保護材/歯面コーティング材)
認証番号: 303AABZX00051000 (管理)
◎製造販売元: YAMAKIN株式会社 〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月~金 9:00~17:30 ± 9:00~17:00
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937020968

C02527/2026年4月/@20/改