

DENTAL WHITENING GEL

DENTAL WHITENING GEL

angelus® HOME 10% 16%



▲ 院内用紹介動画



▲ 製品紹介動画



| コードNo. | 製品名 |
|--------|------------------------|
| 444119 | アンジェラス ホーム10% スターターキット |
| 444044 | アンジェラス ホーム10% 2本入 |
| 444051 | アンジェラス ホーム10% 6本入 |
| 444069 | アンジェラス ホーム10% 12本入 |
| 444126 | アンジェラス ホーム16% スターターキット |
| 444083 | アンジェラス ホーム16% 2本入 |
| 444091 | アンジェラス ホーム16% 6本入 |
| 444101 | アンジェラス ホーム16% 12本入 |
| 444076 | アンジェラス ホーム マウストレー 5枚入 |

アンジェラスホーム10%(16%)スターターキット内容
 ・アンジェラスホーム10%(16%)3gシリンジ×4本
 ・アンジェラスホームマウストレー×2枚
 ・リーフレット(カラーチャート記録用紙付)×1セット
 ※シリンジ単品は10%、16%全て内容量3.0gです。



▲ ポスター



▲ 患者様用リーフレット

| コードNo. | 製品名 |
|--------|---------------------------------------|
| 445001 | アンジェラス ホーム ポスター(A3カラー1枚入) |
| 444806 | アンジェラス ホーム患者様用リーフレット (20枚+スタンド1個付) |

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 ● 価格は2023年9月現在の税別価格です。

一般的名称：医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
 販売名：アンジェラス ホーム
 承認番号：30100BZX00059000 (高度)

一般的名称：医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
 販売名：アンジェラス ホーム 16%
 承認番号：30400BZX00204000 (高度)

一般的名称：歯科用咬合スプリント
 販売名：アンジェラス ホーム マウストレー
 届出番号：27B1X00147000005 (一般)



ラインナップ

患者さまの負担が少なく、手軽に行えるホームホワイトニング材で健康的な白い歯へ。
充実した関連製品がホワイトニング治療をトータルでサポートします。

効率重視の方には

過酸化尿素 **16%**
装着時間 **1.5時間**

※装着時間は1日の時間です。

優しさ重視の方には

過酸化尿素 **10%**
装着時間 **2時間**

※装着時間は1日の時間です。

ホワイトニングに関するQ&A

Q.1

ホワイトニングって痛くないの？

A.

治療中に感じる不快感として知覚過敏があげられます。

Q.2

ホワイトニングの効果はどれくらい持続しますか？

A.

生活スタイルや加齢現象により若干あと戻り（治療前の歯の色に近づく）があります。しかし、定期的にタッチアップをすることで白さが甦ります。

Q.3

詰め物やかぶせも白くなりますか？

A.

ホワイトニングは天然歯のエナメル質だけに作用します。充填物や前装冠を白くすることはできません。治療後の新しい色に合わせて取り換えが必要になることがあります。

Q.4

他治療との関連は？

A.

ラミネートベニアやオールセラミック等の審美的な治療の際、あらかじめそれ以外の歯にホワイトニングを施しておくことで、よりよい結果が期待できます

シリンジ内容量3.0g

※ 6 歯合計で1目盛り(0.5g)が目安です。
※ 本品の使用前、使用後は冷蔵保存をお勧めします。
※ 製品には気泡が混入していることがありますが、品質等には問題ありません。

シンプルな処置で 歯科医院さま、患者さまの負担を軽減

歯科医院での処置

1 診察・診断

歯のみならず歯肉その他口腔内全体の診査をします。

※ホワイトニング治療を始める前に必要な歯科治療がある場合があります。

3 治療について説明

治療方法、治療期間、治療費等の説明を受けます。

4 印象採得 マウストレーの製作

治療を決めた後マウストレーの製作のため上下の歯の型を取ります。

2 治療

ホワイトニング治療だけでは良好な改善がなく、セラミック冠などの治療の追加が必要な場合があります。

5 マウストレーの試適 使用方法の説明

マウストレーを試適し、使用方法の説明を受けます。マウストレー、10%または16%のホワイトニングジェルを受け取ります。

自宅で行う処置

1 清掃

マウストレー装着の前に歯磨きをします。

3 マウストレーの装着 使用後のお手入れ

歯科医師より指示された時間を守ってマウストレーを装着します。マウストレーを外したら、口腔内をよくすすぎ歯みがきをします。マウストレーは水で洗浄します。高温のお湯を使用するとマウストレーが変形します。マウストレーはトレーケースに入れて常温で保存します。ホワイトニングジェルはキャップをしっかり締め、冷蔵庫に保管します。

2 ジェルの注入

キャップを外してシリンジのプランジャーを押してホワイトニングジェルを出します。マウストレーの内面の液溜めに、10%または16%のホワイトニングジェルを1歯あたり米粒1~2粒大を入れます。

チップのご使用上注意

アプリケーションチップの先端を、くびれ部分で折り切ります。(切り取ったZパーツは上下逆さまにして装着することで抽出口のキャップになります)キャップ突起部をアプリケーションチップ先端部に押し込むように挿入して先端部をしっかり開口してください。開口が不十分だとホワイトニングジェルが出にくくなります。

4 ホワイトニング後

マウストレーを外した後は、少なくとも30分間はコーヒー・紅茶など色のついた飲食物は避けましょう。