

DENTAL WHITENING GEL

院内用紹介動画



製品紹介動画



・アンジェラス ホーム10%



・アンジェラス ホーム16%



コードNo.	製品名	標準価格
444119	アンジェラスホーム10% スターターキット	¥7,300
444044	アンジェラスホーム10% 2本入	¥3,400
444051	アンジェラスホーム10% 6本入	¥7,900
444069	アンジェラスホーム10% 12本入	¥14,000
444126	アンジェラスホーム16% スターターキット	¥8,300
444083	アンジェラスホーム16% 2本入	¥4,200
444091	アンジェラスホーム16% 6本入	¥8,300
444101	アンジェラスホーム16% 12本入	¥14,500
444076	アンジェラスホーム マウストレー 5枚入	¥2,200

アンジェラスホーム10%(16%)スターターキット内容

- ・アンジェラスホーム10%(16%) 3gシリンジ × 4本
- ・アンジェラスホーム マウストレー × 2枚
- ・リーフレット(カラーチャート記録用紙付) × 1セット

※シリンジ単品は10%、16%全て内容量3.0gです。



※イメージ



No. 445001

アンジェラスホーム ポスター
(A3カラー 1枚入)
標準価格：¥600

No. 413611

アンジェラスホーム 患者お渡し用紙袋
(20枚×1セット)
標準価格：¥3,500

No. 444806

アンジェラスホーム 患者様用リーフレット
(20枚 + スタンド1個付)
標準価格：¥830

アンジェラスホーム ユニットPOP
(20枚 + スタンド1個付)
※詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格は2024年11月現在の税別価格です。

アンジェラスホーム10%

販売名：アンジェラスホーム
一般的名称：医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
承認番号：30100BZX00059000(高度)

アンジェラスホーム16%

販売名：アンジェラスホーム
一般的名称：医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
承認番号：30400BZX00204000(高度)

アンジェラスホーム マウストレー

販売名：アンジェラスホーム
一般的名称：歯科用咬合スプリント
承認番号：27B1X00147000005(一般)

製造販売元：Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積 4-13-206

販売元：株式会社 **3シヤ** 東京都台東区上野7-6-9 TEL.0800-170-5541(ユニット・歯科材料・滅菌器のお問い合わせ)



(01)02747937020685

C02499/2024年11月/PRI/100/@40/改

angelus®

YOSHIDA

医薬品含有歯科用歯面清掃補助材

DENTAL WHITENING GEL

angelus® HOME

2種類の濃度を有した新しいホームホワイトニング材
フッ化ナトリウム・硝酸カリウム含有(添加剤として)



過酸化尿素

10%



過酸化尿素

16%

LINE UP


患者さまの負担が少なく、手軽に行えるホームホワイトニング材で健康的な白い歯へ。
充実した関連製品がホワイトニング治療をトータルでサポートします。

フッ化ナトリウム・硝酸カリウム含有(添加剤として)

効率重視の方には

過酸化尿素
16%


装着時間
1.5時間
※装着時間は1日の時間です。

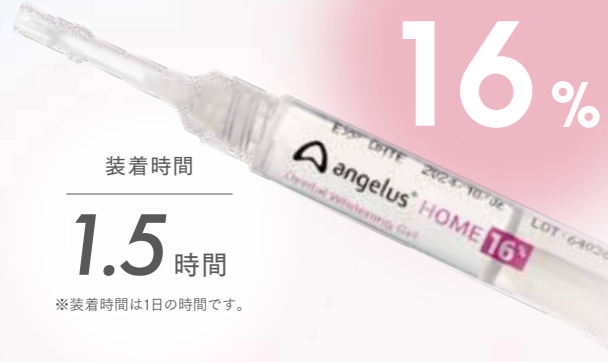

優しさ重視の方には

過酸化尿素
10%

装着時間
2時間
※装着時間は1日の時間です。

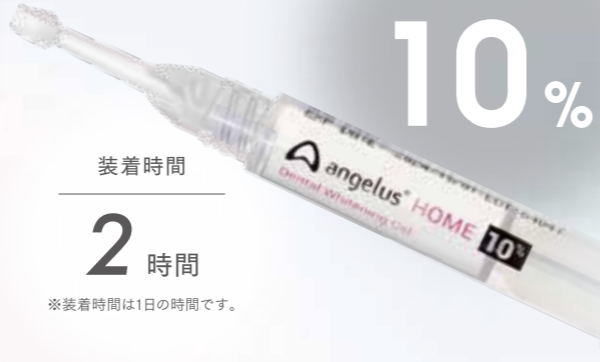

ホワイトニングに関する Q & A

Q.1

ホワイトニングって
痛くないの？

A.

治療中に感じる不快症状として
歯がしみることがあります。

Q.2

ホワイトニングの効果は
どれくらい持続しますか？

A.

生活スタイルや加齢現象により
若干あと戻り*があります。
しかし、定期的にタッチアップを
することで白さが甦ります。

※治療前の歯の色に近づく状態

Q.3

詰め物やかぶせも
白くなりますか？

A.

ホワイトニングは天然歯の
エナメル質だけに作用します。
充填物や前装冠を白くすることは
できません。治療後の新しい色に
合わせて取り換えが
必要になることがあります。

Q.4

他治療との関連は？

A.

ラミネートベニアやオール
セラミック等の審美的な治療の際
あらかじめそれ以外の歯に
ホワイトニングを施しておくこと
によりよい結果が期待できます。

シリンジ内容量3.0g



※6歯合計で1目盛り(0.5g)が目安です。
※本品の使用前、使用後は冷蔵保存をお勧めします。
※製品には気泡が混入していることがありますが、品質等には問題ありません。

チップのご使用上注意

アプリケーターチップの先端*2を、くびれ部分で折り切ります。
キャップ突起部をアプリケーターチップ先端部に押し込む
ように挿入して先端部をしっかりと開口してください。開口が
不十分だとホワイトニングジェルが出にくくなります。



※2 切り取ったZパーツは上下逆さまにして装着することで抽出口のキャップになります

シンプルな処置で **歯科医院さま** **患者さま** の負担を軽減

歯科医院

での処置

2

治療

ホワイトニング治療だけでは
良好な改善がなくセラミック冠などの
治療の追加が必要な場合があります。

4

印象採得
マウストレーの製作

治療を決めた後、マウストレーの製作のため
上下の歯の型を取ります。

3

治療について説明

治療方法治療期間、
治療費等の説明を受けます。

5

マウストレーの試適
使用方法の説明

マウストレーを試適し、使用方法の説明を受けます。
マウストレー、10%または16%のホワイトニングジェルを受け取ります。

1

診察・診断

歯のみならず歯肉その他
口腔内全体の診査をします。

※ホワイトニング治療を始める前に
必要な歯科治療がある場合があります。

自宅

での処置

1

清掃

マウストレー装着の前に歯磨きをします。

2

ジェルの注入

キャップを外してシリンジのプランジャーを押して
ホワイトニングジェルを出します。
マウストレーの内面の液溜めに、10%
または16%のホワイトニングジェルを1歯あたり
米粒1~2粒大を入れます。

3

マウストレーの
装着使用後のお手入れ

歯科医師より指示された時間を守ってマウストレーを装着します。
マウストレーを外したら、口腔内をよくすすぎ歯みがきをします。
マウストレーは水で洗浄します。
高温のお湯を使用するとマウストレーが変形します。
マウストレーはトレーケースに入れて常温で保存します。
ホワイトニングジェルはキャップをしっかりと締め、冷蔵庫に保管します。

4

ホワイトニング後

マウストレーを外した後は、
少なくとも30分間はコーヒー・紅茶
など色のついた飲食物は避けましょう。

