



Surfex

サーフェックス
Dry Surface Biofilm Remover

求められるバイオフィルム対策



内容：サーフェックス 8.5g×100 個入



DSB (Dry Surface Biofilm: 乾燥表面バイオフィルム) とは…

バイオフィルムは、従来の湿潤面だけでなく、乾燥面でも増殖することが、近年の研究により発見されました。乾燥した表面のバイオフィルム (DSB) は、塩素などの殺生物剤に著しく抵抗し、オートクレーブなどの熱処理にも抵抗することが実証され、カーテン、ベッドレール、椅子、電話、カルテなど、医療現場のほとんどの表面に存在し、医療関連感染 (HAIs) に大きな影響を及ぼす可能性があると考えられています。



患者接触面から回収した DSB の SEM 画像
(倍率 10,000 倍)

参考：British Journal of Hospital Medicine 2022 K Ledwoch, K Vickery, J-Y Maillard

特長


1. 洗浄と除菌の環境清拭用材料です。
2. マウスピース、義歯、サージカルガイド等の滅菌ができない器材のバイオフィルム除去用に使用可能です。
3. 使用前に清潔な状態にして使用することができるので、患者さんにより安心した治療を提供することが可能です。

使用方法

1. グローブ、保護衣、保護用ゴーグル等を着用してください。
2. 清潔なボトル (500ml 以上の容量があるもの) と本製品 1 袋 (8.5 グラム) を用意してください。
3. ボトルに 30-40 度の水を 500ml 入れてください。
4. 本製品 1 袋を開けて入れる (*パウダーからボトルに入れないようにしてください)
5. ボトルを閉めて攪拌させてください。
6. 上記のカラーチャートを確認して 青色になったことを確認してから溶液を適正なタオル等にしみ込ませて環境表面を清拭してください。

COLOUR CHART:

0 min → 8 hours**

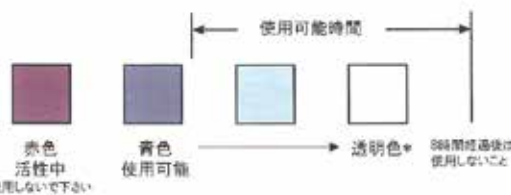

◎販売元：株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格は2024年4月現在の税別価格です。

禁無断転載

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

●お問い合わせは下記まで

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 ± 9:00～17:00
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937021682

C02599/2024年4月/PRI/5/@10/新