

YOSHIDA

×  
YAMAKIN  
SERIES

歯科用色調遮蔽材料 (オペカー)

a·UNO ア・ウーノ オペカー

# OPAQUER

## 薄い塗布でもしっかり遮蔽


高い色調適合性・自然な歯冠色

1色で幅広い症例の色調に合うユニバーサルシェード型コンポジットレジン「ア・ウーノ」の技術を応用した、色調適合性の高い、自然な歯冠色のオペカーです。

透過率を低く設計することにより、薄い塗布厚みでも変色歯や金属が露出した前装冠の金属部をしっかりと遮蔽できます。



オペカーなし

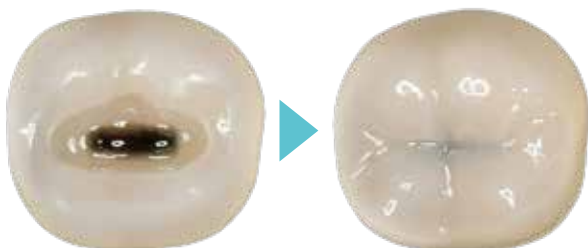

オペカーあり



陶材焼付鑄造冠の  
口腔内リペア



形成後




「ア・ウーノ オペカー」塗布



治療後  
(「ア・ウーノ」ベーシック充填)


## 遮蔽性

「ア・ウーノ オペーカー」は透過率が低く設計されており、背景色を遮蔽することができます。


ア・ウーノ オペーカー	
シェード	UD
光硬化深度 (JIS T 6514 に準拠)	0.4mm
透過率 (ペレット厚み: 0.4mm)	約 16% 

## 硬さ


「ア・ウーノ」で活用したヤマキンのフィラーテクノロジーの採用およびレジンの重合性の向上により、コンポジットレジンと同等の硬度を実現しています。

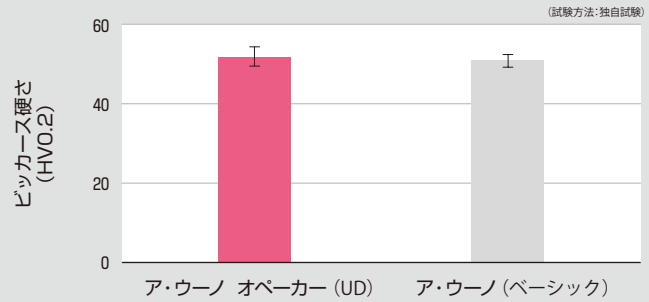


## 操作方法

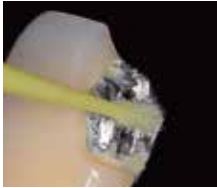

修復面を切削して新鮮面を出し、適切な接着処理を行います。

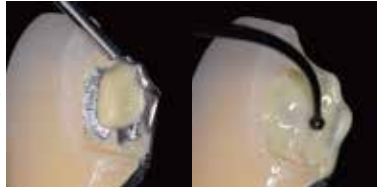

「ア・ウーノ オペーカー」を塗布します。  
(適用部位の半分程度の面積に塗布し、インスツルメント等を用いて薄く広げ、0.4mm 以下にします\*1。)

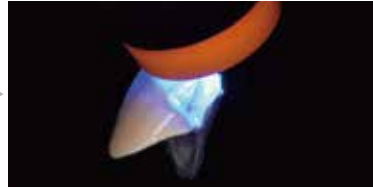

光照射します。  
LED 照射器 (光量 1,000mW/cm<sup>2</sup> 以上) の場合、20 秒以上光照射します\*2。



コンポジットレジンで修復します。

\*1 「ア・ウーノ オペーカー」の光硬化深度は 0.4mm です。厚くなりすぎると硬化不足によるリスクが生じる可能性があるためご注意ください。

\*2 1 回の塗布で色調を遮蔽しきれていない場合は、必要に応じて光照射後に追加で重ね塗りしてください。



# ア・ウーノ OPAQUER

販売名: ア・ウーノ オペーカー  
一般的名称: 歯科用 色調遮蔽材料 認証番号: 306AABZX00018000 (管理)

### 単品包装

ア・ウーノ オペーカー 1.0g (0.5mL)  
付属品: ニードルチップ 10本 (UD)  
標準価格: 1,400円 (税別)

小容量で  
ムダなく  
使える



保険適用

販売名: ア・ウーノ  
一般的名称: 歯科充填用コンポジットレジン 認証番号: 304AABZX00013000 (管理)

※ローフローおよびフローにはニードルチップ 10本が付属します。

### ユニバーサル



ア・ウーノ ユニバーサル  
(ベーシック/St ベーシック)  
各 4.0g (2.0mL) 標準価格: 2,900円 (税別)

### ローフロー



ア・ウーノ ローフロー  
(ベーシック/St ベーシック/St White/St Dark)  
各 2.8g (1.5mL) 標準価格: 2,900円 (税別)

### フロー



ア・ウーノ フロー  
(ベーシック/St ベーシック/St White/St Dark)  
各 2.8g (1.5mL) 標準価格: 2,900円 (税別)

### パック

同色3本パック  
(ベーシック/St ベーシック)  
・ユニバーサル 標準価格: 8,250円 (税別)  
・ローフロー 標準価格: 8,250円 (税別)  
・フロー 標準価格: 8,250円 (税別)

### 単品

ニードルチップ 20本 標準価格: 600円 (税別)

※カタログ内の試験に関するデータはYAMAKIN株式会社にて検証したのものになります。

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格は2024年7月現在の税別価格です。

禁無断転載



株式会社ヨシダとYAMAKIN株式会社の業務提携により、  
双方スピード感を持ち幅広い市場へ、  
より良い製品提供に尽力してまいります。

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月~金 9:00~17:30 土 9:00~17:00  
(日曜・祝祭日を除く)

●お問い合わせは下記まで



(01)02747937021941