

■ オプション



● マルチデムC27は蒸気生成に必要な脱塩水を、自動で滅菌器本体へ給水します。

■ 水道水の電気伝導率と濾過容量

電気伝導率	使用可能な水量(目安)
50µs/cm	2250L
100µs/cm	1130L
200µs/cm	565L
300µs/cm	375L
400µs/cm	280L
500µs/cm	225L

■ 仕様

作 動 圧 力：2bar-8.6bar(最大)  
 水 温 ( 入 )：4°C-30°C  
 標 準 流 量：毎時60L  
 水 質 ( 出 )：脱塩水(EN13060)  
 水 質 ( 入 )：水道水  
 質 量：2.7kg  
 幅/奥行/高さ：124mm/123mm/476mm  
 ホースの長さ：3m×2本

■ 使用イメージ



滅菌状況モニタリングシステム接続  
 日々の滅菌環境をサポート

デントクレーブ  
**Rinato**  
 小型高圧蒸気滅菌器

■ 標準価格

・デントクレーブRinato【商品コード:413629】	¥1,240,000
・Rinato保証パック(5年間または累計4000回使用)【商品コード:415637】	¥70,000
・Rinato遠隔サポート用回線使用料(5年間)【商品コード:415644】	¥120,000
・Rinato遠隔サポート用回線使用料(6年目から8年目)【商品コード:415651】	¥72,000
・デントクレーブRinato 消耗品セット【商品コード:417022】	¥19,000
・ドアパッキン デントクレーブRinato【商品コード:417030】	¥8,500
・Rinato Wi-Fi用USB dongle【商品コード:415669】	¥20,000
・マルチデム C27【商品コード:415676】	¥75,000
・マルチデム C27 交換用カートリッジ【商品コード:415683】	¥39,000
・デントクレーブRinato用 トレーラック【商品コード:417047】	¥18,600
・デントクレーブRinato用 トレー(1枚)【商品コード:417054】	¥8,800
・デントクレーブRinato用 トレーホルダー【商品コード:417061】	¥4,200
・DCスピード・ソル4L【商品コード:884151】	¥1,400

■ スペック

- ・定格電圧:AC200V-240V
- ・電源周波数:50/60Hz
- ・質量:44kg
- ・本体寸法:W465×H452×D646mm
- ・チャンバー容量:22L
- ・給水タンク容量:4.8L

販売名:デントクレーブ Rinato  
 一般的名称:小型未包装品用高圧蒸気滅菌器  
 医療機器認証番号:306ALBZX00002000  
 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■ 消耗品・追加品



トレーラック  
 本体に1つ付属

トレー  
 本体に3枚付属  
 最大5枚まで使用可

トレーホルダー  
 本体に1つ付属

ドアパッキン  
 (ドアガasket)

消耗品セット  
 ドアパッキン×1  
 ダストフィルター×2  
 バクテリアフィルター×2

DCスピード・ソル4L  
 (蒸留水)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格は2024年11月現在の税別価格です。

禁無断転載

●取扱店

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月~金 9:00~19:00 土 9:00~17:00  
 (日曜・祝祭日を除く)



- ▶ ヨーロッパ規格EN13060に準拠したクラスBオートクレーブ。
- ▶ チャンバーは大容量の22ℓ。
- ▶ オンラインによるモニタリングで滅菌情報を管理。故障を未然に防ぎます。



## FEATURES

### 日本語タッチスクリーンディスプレイで簡単操作。



#### 滅菌プログラム

- ・ユニバーサル134℃【クラスB】
- ・ユニバーサル121℃【クラスB】
- ・プリオン134℃【クラスB】
- ・ファスト124℃【クラスS】 ※未包装の器具等

- 各滅菌プログラムは、滅菌開始時間のタイマー設定ができます。
- 滅菌中はチャンバー内温度、圧力、残り時間をスクリーンで確認できます。

滅菌プログラム	Bユニバーサル134℃	Bユニバーサル121℃	Bプリオン134℃	Sファスト134℃
滅菌時間(標準)	39分	54分	42分	20分

※滅菌量が2.0kgの場合。

## RINATO MONITORING SYSTEM 故障・不具合を未然に防ぎます。

### Rinatoモニタリングシステムについて



さらに安心してお使いいただくために...

- ※本機能を使用するためには、別途「Rinato 遠隔サポート用回線使用料」が発生します。
- ※インターネット接続ができるWi-Fi環境が必要です。

### 本体保証について

本体基本保証	延長保証ご加入の場合
ご購入から2年間または、滅菌回数2000回	ご購入から5年間(基本保証+3年間) または、滅菌回数4000回(基本保証+2000回)

上記保証期間中の修理は、保証規定に基づき無償で対応いたします。 ※定期消耗品交換は除く。  
※本体保証の延長には、別途「Rinato保証パック(5年間又は累計4000回使用)」のご加入が必要となります。

### シンプルなデザインのため、日々の清掃や消耗品交換が簡単にできます。



●給水タンク、排水タンク容量は4.9ℓです(滅菌回数約10回相当)。