

スムーズに使えて適度な硬さ

仮封用レジン

---

# RESIN SEAL II

レジンシール II



TEMPORARY CAVITY SEALING RESIN



JAPAN  
QUALITY

一塊除去が容易  
適度な硬さで筆積みしやすく

## 仮封用レジン レジンシールⅡ

チェアタイムの短縮で  
患者さまの負担を軽減

色調



※印刷のため色調は実物とは異なります

### 使用方法 【筆積法】

1	2	3	4	5	除去作業
窩洞を十分に乾燥させます。	筆に液材を染み込ませます。	筆先を粉材に入れ、筆先にレジンを玉を作ります。	窩洞内に直接充填します。	咬合調整をします。	探針などを刺し、一塊で除去が可能。

〈使用上の注意〉

冬季に室温が低くなると、液が2相に分離することがあります。

この場合、瓶をよく振るか、瓶ごと温めるようにしてください。上澄み相のみを使用しない限り物性に影響はありません。

### 製品案内

#### レジンシールⅡ

一般的名称：歯科用高分子系仮封材料 認証番号：305AFBZX00085A01(管理医療機器)

商品コード 416924  
レジンシールⅡ スターターセット  
セット内容 粉50g, 液50mL, スポイト  
標準価格 5,200円  
販売名：レジンシールⅡ スターターセット

商品コード 416949  
レジンシールⅡ 液300mL  
標準価格 9,600円  
販売名：レジンシールⅡ 液300mL

商品コード 416931  
レジンシールⅡ 粉250g  
標準価格 11,500円  
販売名：レジンシールⅡ 粉250g

仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2025年7月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月～金 9:00～19:00 土 9:00～17:00  
(日曜・祝祭日を除く)

●お問い合わせは下記まで

●販売元：株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野 7-6-9

●製造販売元：亀水化学工業株式会社 大阪府寝屋川市豊里町 17-16



(01)02747937023013

C02732/2025年7月/@20/新