

付属品



ブラスティオ本体、ブラスティオ専用アルミナパウダー50μm※、パウダーボトルスペア、チューブ、スタンド、専用レンチ、クリーニングワイヤー

仕様

型式	BLS-1	本体寸法※	幅90mm X 奥行30mm X 高さ95mm
入力エア圧力	0.5MPa 以下	重量※	192g
【禁忌・禁止】 1.パウダーを再使用しないこと。 2.口腔内で使用しないこと。(口腔内を損傷させるおそれがある)			

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載

販売名:ブラスティオ
一般的名称:歯科用研削器材
届出番号:13B2X00043000006 (一般)
◎製造販売元:株式会社ミクロン 東京都大田区池上2-17-7

◎発売元:  株式会社 **ヨシダ**
東京都台東区上野7-6-9
<http://www.yoshida-dental.co.jp>

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは
 株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター
0800-170-5541
※対応時間 / 月～金9:00～17:30、土9:00～17:00(日曜・祝祭日を除く)



YOSHIDA



アルミナパウダー。研磨作用あり。

チェアーサイドブラスト

Blastio
ブラスティオ

内面処理加算1:45点 が算定可能

算定要件
※内面処理加算Ⅰは、CAD/CAM冠、CAD/CAM
インレー又は高強度硬質レジンブリッジを装着する
際に、歯質に対する接着力を向上させるために行うアル
ミナ・サンドブラスト処理及びプライマー処理等を行
った場合に算定する。



CAD/CAM冠の接着力アップに チェアーサイドでブラスト処理しませんか？

1

押しやすく工夫された
噴射スイッチ

噴射部位が見やすい
シェイプしたノズル部



ユニットのエアワンタッチ
ジョイントにダイレクトに接続。
チェアーサイドで接着直前に
ブラスト処理できます。

残量が分かりやすい
パウダーボトル

コンパクトなスタンド収納は
チェアーサイドで置き場を
選びません。

2段階の出力調整が可能

処置中、噴射ノズルの微調整で2段階の出力調整ができます。
マージン辺縁部など素材が薄い部位の処置にも最適です。

2



半押しの状態でジルコニアやCAD/CAM冠に適した出力を維持して噴射が可能です。
最後まで押し切ることで、メタル冠に適した最大出力の噴射が行えます。

※入力エア圧が0.4～0.5MPaの場合。※使用する材料によって噴射の出力を調整する必要があります。・ジルコニア、CAD/CAM冠:半押し(中間) ・メタル冠:押し切り(最大)


狭いスペースでも自在に使えるコンパクト設計

チェアーサイドで処置することを考え、
ペンシルタイプと比較して自在に使えるコンパクト設計にしました。

3



コンパクトデザインのため様々な角度で噴射できます

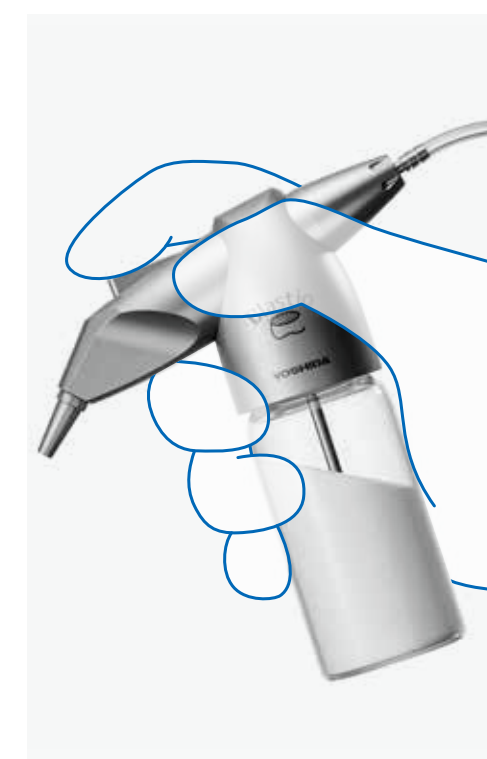

グリップ感が良いブラシスプレータイプ

ブラスト処理は素材を選びません

金属冠、ジルコニアクラウン、CAD/CAM冠やレジン冠の内面処理まで行えます。

4

使用方法



噴射距離の目安は対象から
約10mm 前後の距離



金属冠

CAD/CAMインレー

ジルコニア冠