

各種パーツは滅菌可能

本体はシリコングリップを装着したままオートクレーブ滅菌可能です。
但し乾燥工程にはかけないでください。



※ユリーブラシは10回程度が目安です。



YOSHIDA

ソニックブラシシステム

Yully+

ユリープラス

Plus の実感、Yully+

もっとスピーディーに。もっと心地よく。もっと愛着を。

ユリー標準セット内容

※実寸大

ユリーFブラシ フラット型		ユリーMブラシ 山型	
⑥ φ3mm	⑦ φ5mm	⑧ φ3mm	⑨ φ5mm


○ 標準価格：ユリーブラシ単品(5個入)各4,250円

セット内容	
① 本体	
② ユリーブラシチップ	
③ シリコングリップ(ピーチ)	
④ シリコングリップ(ミントグリーン)	
⑤ シリコングリップ(ラベンダー)	
⑥ ユリーFブラシ小 フラット型(5個入)	
⑦ ユリーFブラシ大 フラット型(5個入)	
⑧ ユリーMブラシ小 山型(5個入)	
⑨ ユリーMブラシ大 山型(5個入)	
⑩ ミクロン ハートレンチ	
⑪ ユリーブラシチップクリーニングワイヤー	

○ 一般的名称：歯科用エアスケーラ ○ 販売名：ユリー ○ 認証番号：226AKBZX00111000(管理医療機器 特定保守管理医療機器)
○ 標準価格：ユリーPLUS 各種 154,000円 ○ 保証期間：1年6ヶ月

ダイレクトカップリングタイプ


各社のタービンホースに直接接続可能なダイレクトカップリングタイプもラインナップ

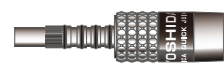

ユリーPLUS-Y
ヨシダ オブチジョイント




ユリーPLUS-K
KaVo® MULTI flex LUX®

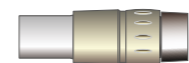

ユリーPLUS-N
NSK® Mach/Phatelus®



ユリーPLUS-OS
オサダファインジョイント

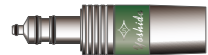

ユリーPLUS-YST
ヨシダ STジョイント



ユリーPLUS-M
MORITA® モリタαメインチューブ



ユリーPLUS-S
Sirona® Quick coupling

○ KaVo®及びMULTI flex LUX®は、Kaltenbach & Voigt GMBH&CO.KGの商標又は登録商標です。○ Sirona®及びQuick couplingは、Sirona Dental Systems GMBHの商標又は登録商標です。○ NSK®及びMach/Phatelus®は株式会社ナカニの商標又は登録商標です。○ MORITA®及びモリタαメインチューブは、株式会社モリタ製作所の商標又は登録商標です。○ オサダファインジョイントは、長田電機工業株式会社の商標又は登録商標です。

仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2026年4月現在。消費税は含まれません。

無断転載禁止

◎ 発売元：

株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

○ お問い合わせ：TEL.0800-170-5541(コンタクトセンター) <http://www.yoshida-dental.co.jp>

○ 製造販売元：株式会社ミクロン 東京都大田区池上2-17-7



(01)02747937024140

C02843/2026年4月/@40/新

カタログに掲載している製品画像は実物スケールで表現しております。

あのブラシハンドピースYullyに 新たなPlusを実感。


Yully+の詳細



「スピード」と「心地よさ」が共鳴する、「Plus」の体験をその手で。

音波振動による洗浄効果

注水下で水流と振動の音波効果によって発生する泡により、バイオフィルムの破壊や洗い流し作用を生かしたプラーク除去、無水下でポリッシングペーストを使用した細部のステイン除去等、幅広い診療に使用できます。無水で使用する際は、適宜注水を行い歯面清掃部位とブラシ、ブラシホルダーを冷却しながら使用します。

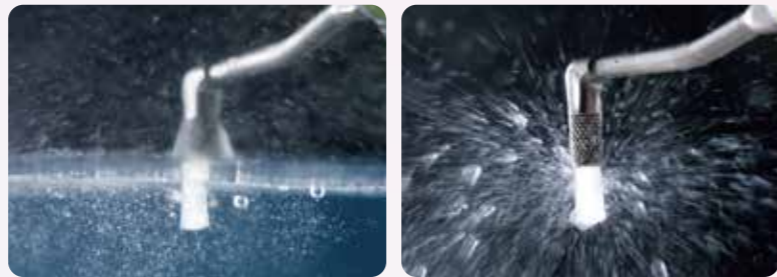

Plus 1

もっとスピーディーに。

振幅が従来比1.3倍になり、
清掃時間を約30%短縮。
より効率的に施術を行えます。

清掃面積95%以上を基準とした場合の所要時間を測定。
Yully+は、速いスピードの場合でも清掃時間を約3秒(30%)短縮しました。



Time Saving




約30%短縮

Plus 2

もっと心地よく。

さらに軽いタッチで清掃が可能に。
デリケートな歯肉周辺や痛みに敏感な方へも
より優しい施術をご提供できます。

低荷重環境下における清掃面積を測定。
わずか20g前後の軽いタッチでも、Yully+は
従来より広い清掃面積を実現しました。

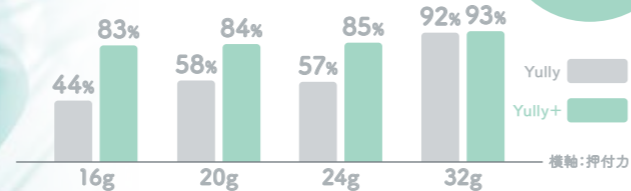

Feather Touch



Plus 3

もっと愛着を。

やさしい色合いのパステルカラーのグリップと
指にやさしくフィットする形状の「ハートレンチ」を採用。
機能性に「ときめき」を添えてお届けします。



Feather Touch



歯面の清掃、インプラント周りのデリケートゾーン
矯正装置のプラーク除去に“ちから”を発揮します。

ブラシ専用ハンドピース

Yully+はブラシ専用設計なので、操作も見た目もシンプル。
面倒な調整はありません。手になじむ形状と軽いハンドピース。
歯面へのアクセスも良好で、より手軽にご使用いただけます。

使いやすい角度のブラシチップ

長めのネックと垂直に近いヘッド角度により、
最後臼歯遠心部や隅角部など、さまざまな部位にアクセスしやすくなりました。

	Yully+	当社他製品
重量(g)	59	73
パワー調整	不要	要
空気手元圧力(MPa)	0.3	0.3
空気消費量(L/min)	21	23
冷却水圧力(MPa)	0.2	0.2
冷却水量(ml/min供給時)	34	29
ヘッド角度(°)	110	130



口腔内の状態に合わせて選べる4タイプのブラシで
デンタルハイジニストのPMTCを効率的にサポートします。

辺縁歯内部の洗浄



根面露出部の清掃



シーラント充填前の裂溝清掃



粘膜についた歯垢染色剤の除去



余剰セメント除去



ラミネートベニアや
ポーセレンのメンテナンス



無水下でのペースト併用による
ステイン除去



根板周囲の洗浄




矯正装置のプラーク除去



インプラントのアバットメント清掃



ボーンアンカーブリッジの
メンテナンス

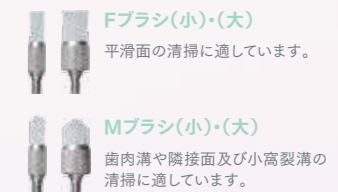

コア接着時における根管口の洗浄や
レーザー治療の際などドクターの治療にもお役に立ちます。

コア接着のための根管口洗浄



レーザー治療の後処理



修復物装着前の清掃(CAD/CAM冠にも)

