

DENTA NOVA

歯科切削加工用レジン材料

CAD/CAM対応



小白歯

小白歯

大白歯

前歯部





Denta Nova
ブロックⅠ
小白歯用保険適用
CAD/CAM 冠用材料
(保険算定Ⅰ)

Denta Nova
ブロックⅡ
小白歯用保険適用
CAD/CAM 冠用材料
(保険算定Ⅱ)

Denta Nova
ブロックⅢ
大白歯用保険適用
CAD/CAM 冠用材料
(保険算定Ⅲ)

Denta Nova
ブロックⅣ
前歯部用保険適用
CAD/CAM 冠用材料
(保険算定Ⅳ)

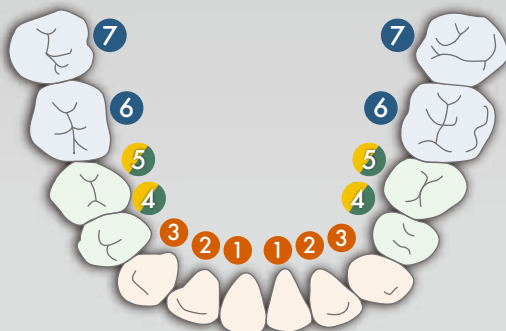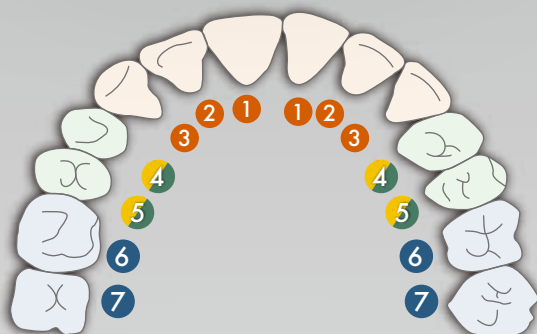

Denta Nova ブロック シリーズ
CAD/CAM 冠・インレー適用部位

① ② ③ 前歯部 CAD/CAM 冠材料 Ⅳ

④ ⑤ 小白歯 CAD/CAM 冠材料 Ⅰ Ⅱ

⑥ 大白歯 CAD/CAM 冠 Ⅲ


⑦ 大白歯 CAD/CAM 冠 Ⅲ

DENTA NOVA

CAD/CAM対応
歯科切削加工用レジン材料


審美性と耐久性を考慮したCAD/CAM対応レジン材料

3点曲げ強さ

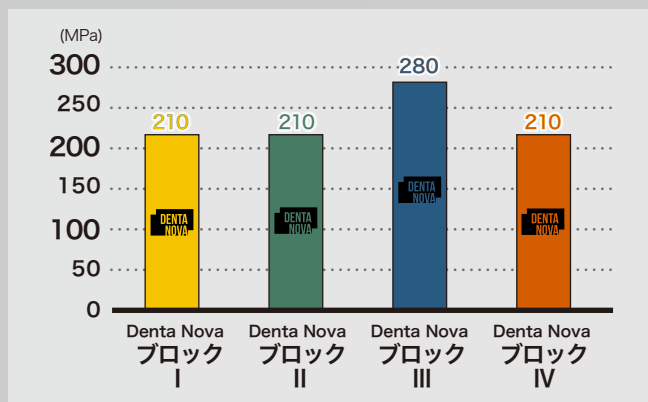

*自社試験 *ISO10477:2004に「37°Cの水中に7日間浸漬後」の条件を付加

ビッカース硬さ

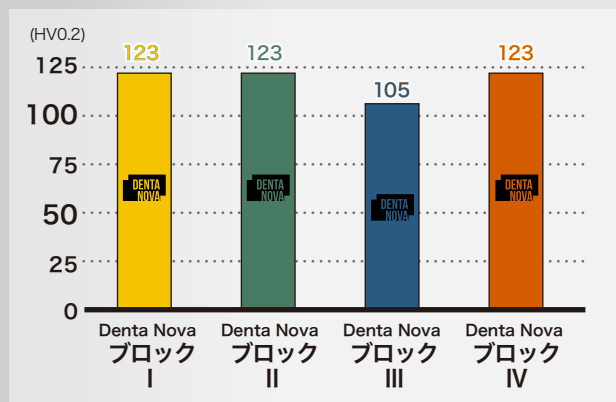


*自社試験 *ISO14705:2016

形成方法

咬合面

最小厚み 1.5mm~2mm

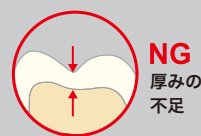

歯頸部

約 1mm

隅角

丸みを帯びたエッジ



隣接面

最小厚み 1.5mm



マージン形状

OK

NG

豊富なシェードとサイズの ラインナップ

ブロックIIとIIIには
インレーに使用しやすい
サイズ「In8」を用意!

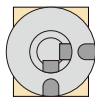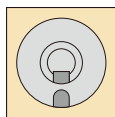

シングルノッチ

デュアルノッチ

ブロックI・II・IIIのIn8/12サイズ
は、さまざまなミリングマシンに
対応可能なデュアルノッチ仕様。

DentaNova ブロック I (5個入)

サイズ (A×B×C) (単位 mm)	標準価格(税抜)
12 (10×12×15)	¥10,000
14L (14.5×14.5×18)	¥11,000
シェード HT A1,A2,A3 LT A1,A2,A3,A3.5 層 単層	

DentaNova ブロック II (5個入)


サイズ (A×B×C) (単位 mm)	標準価格(税抜)
In8 (8×14.5×18)	¥ 9,500
12 (10×12×15)	¥10,000
14L (14.5×14.5×18)	¥12,000
シェード HT A1,A2,A3 LT A1,A2,A3,A3.5 層 単層	

DentaNova ブロック III (5個入)

サイズ (A×B×C) (単位 mm)	標準価格(税抜)
In8 (8×14.5×18)	¥15,500
12 (10×12×15)	¥19,000
14L (14.5×14.5×18)	¥19,000
シェード HT A1,A2,A3 LT A1,A2,A3,A3.5 層 単層	

DentaNova ブロック IV (5個入)

サイズ (A×B×C) (単位 mm)	標準価格(税抜)
12 (10×12×15)	¥20,000
14L (14.5×14.5×18)	¥20,000
シェード LT A1,A2,A3 層 3層 (切縁部: エナメル色 - 中間色 - 歯頸部: デンティン色)	

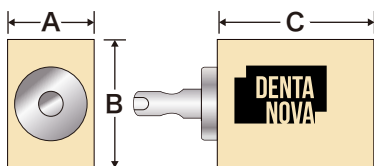

- 一般名称: 歯科切削加工用レジン材料 販売名: DentaNova ブロック I 管理医療機器 認証番号: 307AGBZX00056000
 - 一般名称: 歯科切削加工用レジン材料 販売名: DentaNova ブロック II 管理医療機器 認証番号: 307AGBZX00036000
 - 一般名称: 歯科切削加工用レジン材料 販売名: DentaNova ブロック III 管理医療機器 認証番号: 307AGBZX00071000
 - 一般名称: 歯科切削加工用レジン材料 販売名: DentaNova ブロック IV 管理医療機器 認証番号: 307AGBZX00057000
- 上記製造販売元: 有限会社デンタルテクニカ 大阪府茨木市上中条 1-1-37

販売元 株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは
株式会社ヨシダ コンタクトセンター

0800-170-1170 月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00 (日曜・祝祭日を除く)

※このカタログに記載の価格は2026年8月現在の標準価格(税別)です。
※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

無断転載禁止



C02876/2026年8月/@20/新